



10. POBIERANIE WYCISKU METODĄ ZAMKNIĘTĄ BEGO SEMADOS® S/RI SUB-DENT

10.1 Pobieranie wycisku metodą zamkniętą Sub-Dent

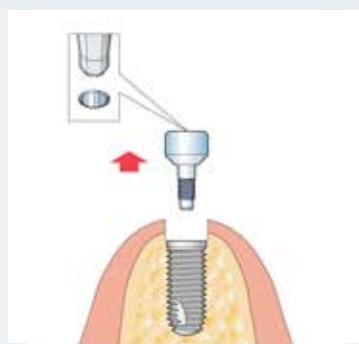


Odkręcenie śruby gojącej

Śrubę gojącą wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Miejsce połączenia z implantem należy przed umieszczeniem transferu wyciskowego Sub oczyścić z krwi i resztek tkanki.

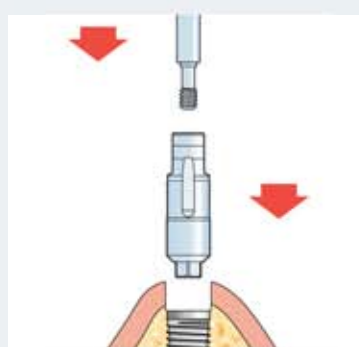


Montaż transferu wyciskowego

Transfer wyciskowy Sub Dent umieścić w taki sposób na implantcie, aby wszedł on w hex antyrotacyjny. Następnie przykręcić go śrubą tytanową L11 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm). (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/śrubokręt płaski). Sprawdzić szczelność (w razie potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie).

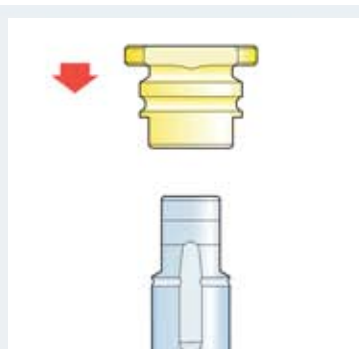

Montaż czapeczki do wycisków

Czapeczkę do wycisków umieścić na transferze wyciskowym Sub Dent, tak aby wyczuć zakleszczenie. Następnie sprawdzić prawidłowe dopasowanie. **Uwaga:** skrzydełka czapeczki muszą być skierowane równolegle do powierzchni płaskich transferu wyciskowego.

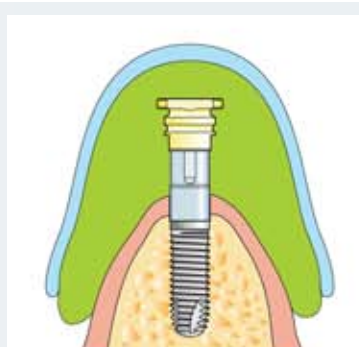

Pobranie wycisku


Zaleca się pobieranie wycisku przy pomocy łyżki indywidualnej. Zablokować duże podcienie w łuku zębowym (np. przęsła mostu). Do pobierania wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas hydrokoloidalnych).

10.1 Pobieranie wycisku metodą zamkniętą Sub-Dent




Uwalnianie wycisku z jamy ustnej

Czapeczka do wycisków pozostaje w materiale wyciskowym i wraz z łyżką wyciskową jest wyjmowana z jamy ustnej.

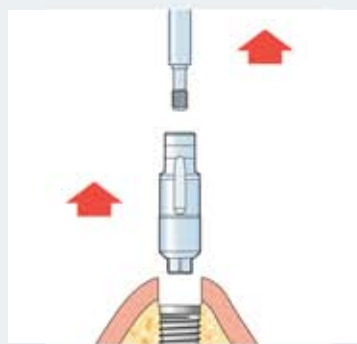

Demontaż transferu wyciskowego


Śrubę tytanową L11 odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/śrubokręt płaski), wyjąć transfer wyciskowy i wraz z analogiem implantu z zestawu do pobierania wycisków przekazać technikowi dentystycznemu.

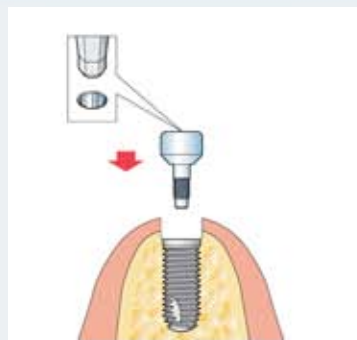

Założenie śruby gojącej


Przykręcić śrubę gojącą zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).

10.2 Wykonanie modelu na podstawie wycisku pobranego metodą zamkniętą.

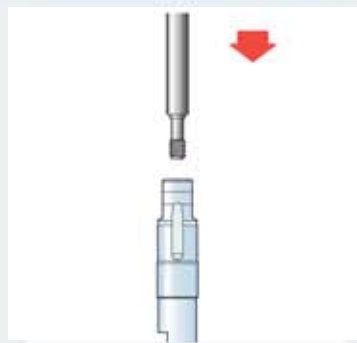


Montaż analogu implantu

Transfer wyciskowy Sub należy wpasować w hex antyrotacyjny w implancie. Następnie przykręcić go śrubą tytanową L11 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/wkrętak płaski).

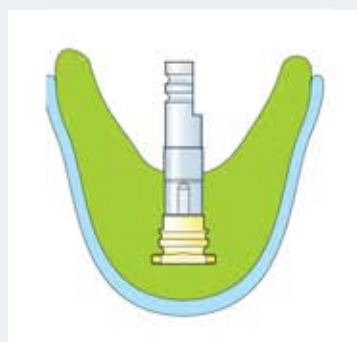

Umieszczenie transferu wyciskowego


Umieścić transfer wyciskowy/analog implantu w wycisku. W tym celu należy wykorzystać nacięcie na transferze wyciskowym, aby transfer wyciskowy znalazł się dokładnie w czapeczce do wycisków. Zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie (szczelność) oraz zdolność materiału wyciskowego powrotu do pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). W razie potrzeby ze względu na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany model.

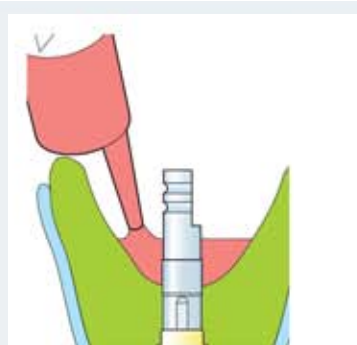

Wykonanie maski dziąsłowej

Wykonać maskę dziąsła zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Zaleca się używanie silikonu addycyjnego, aby móc przechowywać modele przez dłuższy okres.


W przypadku stosowania systemu BEGO Semados® Sub należy koniecznie wykonywać maskę dziąsłową.

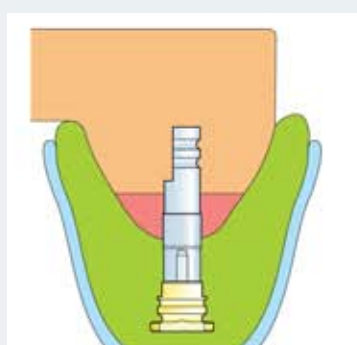

Wykonanie modelu


Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

10.2 Wykonanie modelu na podstawie wycisku pobranego metodą zamkniętą.

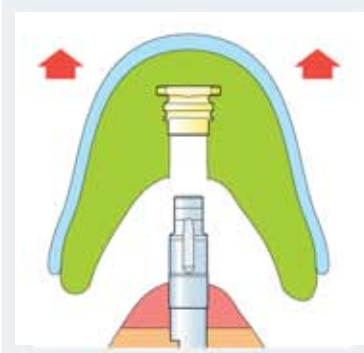

Uwalnianie modelu z wycisku

Model należy uwolnić z wycisku dopiero po całkowitym związaniu materiału użytego do wykonania modelu (przestrzegać zaleceń producenta materiału). Należy zwrócić uwagę na oś transferu wyciskowego oraz ewentualne użębienie resztkowe. Czapeczka do wycisków pozostaje w wycisku.

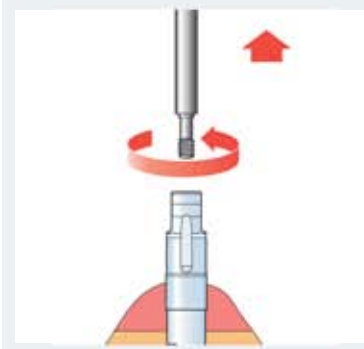

Odkręcenie śruby z transferu wyciskowego

Śrubę tytanową L11 poluzować w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usunąć transfer wyciskowy Sub. (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/śrubokręt płaski).



Demontaż transferu wyciskowego

Usunąć transfer wyciskowy Sub z analogu implantu.