



11. POBIERANIE WYCISKU METODĄ OTWARTĄ BEGO SEMADOS® S/RI SUB-DENT

11.1 Pobieranie wycisku metodą otwartą Sub-Dent

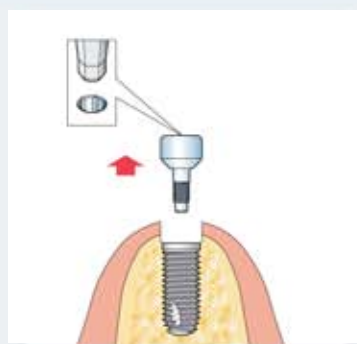


Odkręcenie śruby gojącej

Śrubę gojącą wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Miejsce połączenia z implantem należy przed umieszczeniem transferu wyciskowego Sub oczyścić z krwi i resztek tkanki.

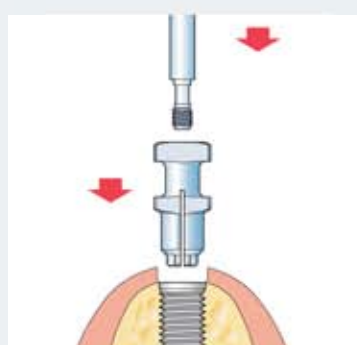


Montaż transferu wyciskowego

Transfer wyciskowy Sub umieścić w taki sposób na implancie, aby wszedł on w hex antyrotacyjny. Następnie przykręcić go śrubą tytanową L16 lub L21 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie /10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/śrubokręt płaski). Sprawdzić szczelność (w razie potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie).

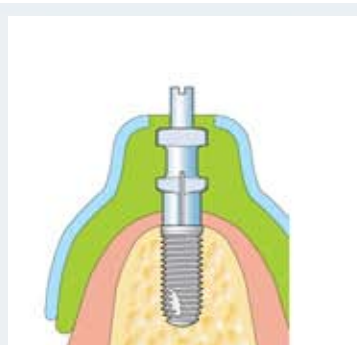

Wycisk


Dokonać przymiarki łyżki indywidualnej i w razie potrzeby dopasować otwory na śruby tytanowe L16 lub L21. Otwory w łyżce zamknąć płytką wosku, aby zapobiec wypływowi masy wyciskowej. Zablokować duże podcienie w łuku zębowym (np. przesła mostu). Do pobierania wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas hydrokoloidalnych).

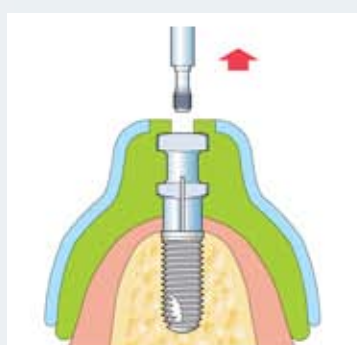

Odkręcenie śruby tytanowej L16/L21


Uwaga: Po związaniu materiału wyciskowego (przestrzegać zaleceń producenta) należy najpierw odkręcić śrubę tytanową L16 lub L21, wykręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a dopiero potem uwolnić wycisk z jamy ustnej (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski).

11.1 Pobieranie wycisku metodą otwartą Sub-Dent

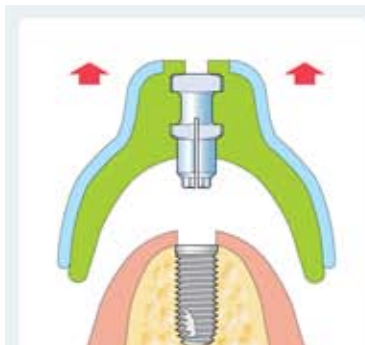

Uwalnianie wycisku z jamy ustnej


Transfer wyciskowy Sub pozostaje w materiale wyciskowym i wraz z masą wyciskową zostaje wyjęty bezpośrednio z jamy ustnej i razem z modelem implantu i zestawem do pobierania wycisku przekazany technikowi dentystycznemu.

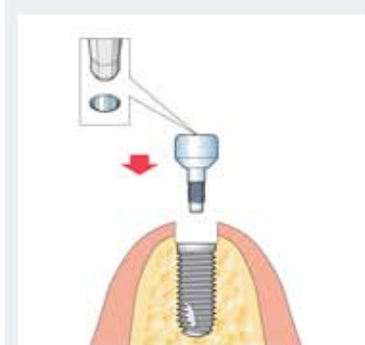

Założenie śruby gojącej

Przykręcić śrubę gojącą zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (solidnie dokręcić/10 Ncm).
(narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).

11.2 Wykonywanie modelu z wycisku pobranego metodą otwartą Sub-Dent

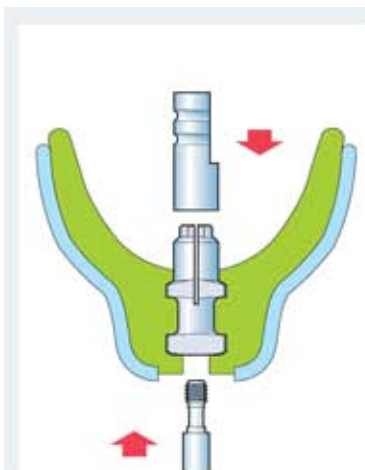


Montaż analogu implantu

Transfer wyciskowy Sub umieścić w taki sposób na implancie, aby wszedł on w hex antyrotacyjny. Następnie przykręcić śrubę tytanową L16 lub L21 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski).

Zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie (szczelność) oraz zdolność materiału wyciskowego powrotu do pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). W razie potrzeby ze względu na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany model.


Podczas przykręcania śruby należy przytrzymać model implantu kleszczami, aby transfer wyciskowy nie przesunął się w wycisku.

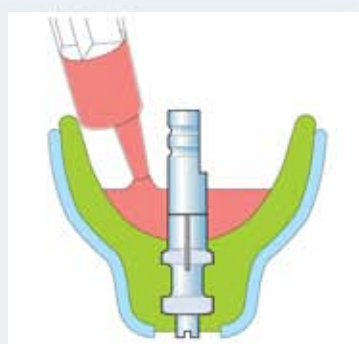

Wykonanie maski dziąsłowej


Wykonać maskę dziąsła zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Zaleca się używanie silikonu addycyjnego, aby móc przechowywać modele przez dłuższy okres.

W przypadku stosowania systemu BEGO Semados® Sub należy koniecznie używać maski dziąsłowej.

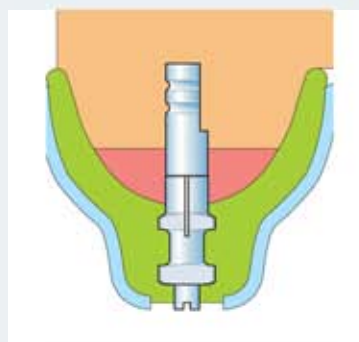


Wykonanie modelu

Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

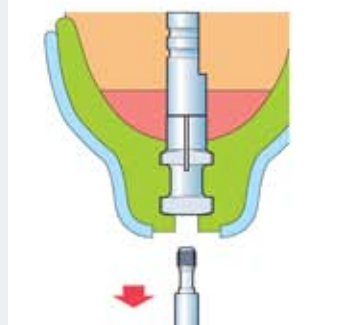

Odkręcenie śruby tytanowej L16/L21

Model należy uwolnić z wycisku dopiero po całkowitym związaniu materiału użytego do wykonania modelu (przestrzegać zaleceń producenta materiału). Poluzować śrubę tytanową L16 lub L21 wykręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski) i wyjąć ją z łyżki wyciskowej.

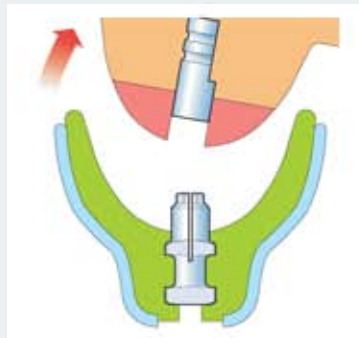

Uwalnianie modelu z wycisku

Zdjąć łyżkę z modelu. Transfer wyciskowy Sub pozostaje w łyżce wyciskowej.