


13. POBIERANIE WYCISKU METODĄ ZAMKNIĘTĄ BEGO SEMADOS® S/RI SUPRA-DENT

13.1 Pobieranie wycisku metodą zamkniętą Supra-Dent

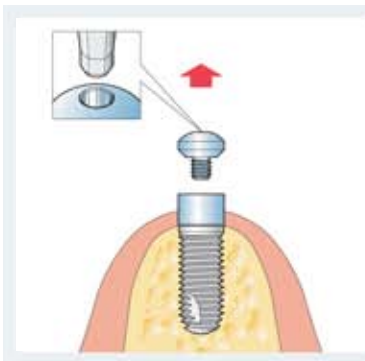


Odkręcenie śruby zamykającej od tulejki dystansowej

Śrubę zamykającą od tulejki dystansowej wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Tulejkę dystansową przed umieszczeniem transferu wyciskowego Supra oczyścić z krwi i resztek tkanki.


Kontrola

Sprawdzić, czy tulejka dystansowa dokładnie przylega do implantu (w razie potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie) sprawdzić siłę dokręcania (moment obrotowy) przy pomocy klucza dynamometrycznego BEGO Semados® (moment obrotowy: 30Ncm) (narzędzie: śrubokręt krzyżakowy)

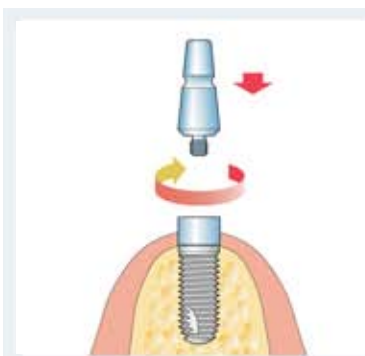

Montaż transferu wyciskowego Supra


Transfer wyciskowy Supra przykręcić do tulejki dystansowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie /10 Ncm). (narzędzie: śrubokręt do transferu wyciskowego).

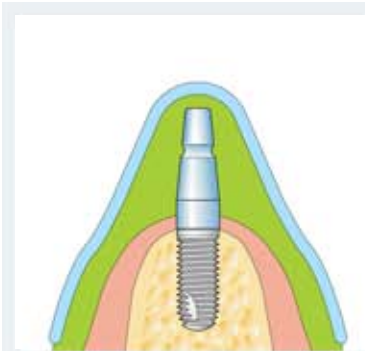

Pobieranie wycisku


Zaleca się pobieranie wycisku przy pomocy łyżki indywidualnej. Zablokować duże podcienie w łuku zębowym (np. przesła mostu). Do pobierania wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas hydrokoloidalnych).

13.1 Pobieranie wycisku metodą zamkniętą Supra-Dent

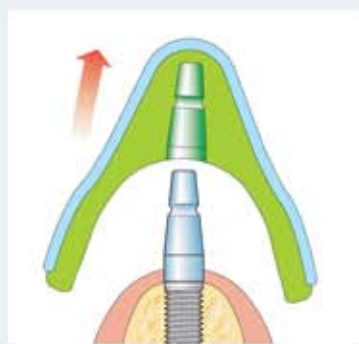


Uwalnianie wycisku z jamy ustnej

Wyjąć łyżkę wyciskową z jamy ustnej.
Transfer wyciskowy Supra pozostaje najpierw w jamie ustnej pacjenta.

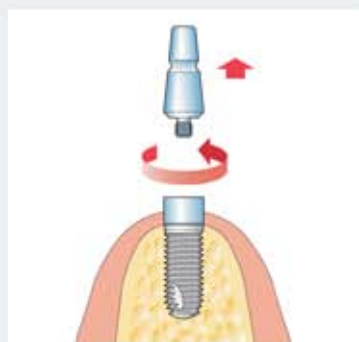

Demontaż transferu wyciskowego


Transfer wyciskowy Supra wykręcić z tulejki dystansowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: śrubokręt do transferów wyciskowych) i razem z modelem tulejki dystansowej z zestawu do pobierania wycisków przekazać technikowi dentystycznemu. Tulejka dystansowa pozostaje w jamie ustnej pacjenta.

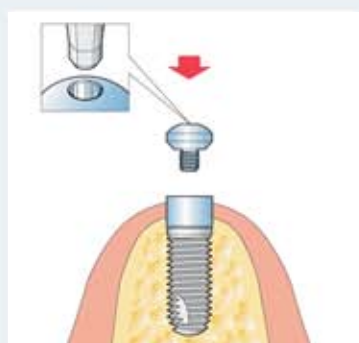

Założenie śruby zamykającej tulejkę dystansową


Przykręcić śrubę zamykającą tulejkę dystansową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm)
(narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).

13.2 Wykonanie modelu z wycisku pobranego metodą zamkniętą Supra-Dent

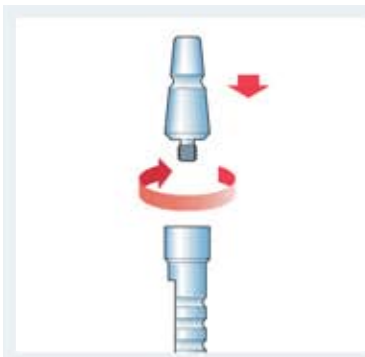

Montaż modelu tulejki dystansowej


Transfer wyciskowy Supra przykręcić do modelu tulejki dystansowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: śrubokręt do transferu wyciskowego).

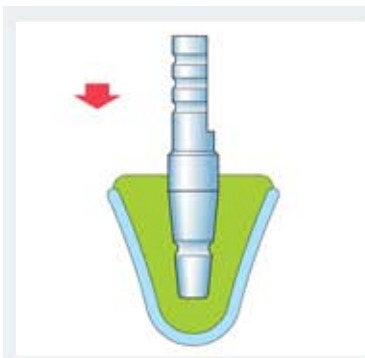

Umieszczenie transferu wyciskowego Supra

Umieścić transfer wyciskowy Supra/model tulejki dystansowej w wycisku. Zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie (szczelność) oraz zdolność materiału wyciskowego powrotu do pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). Ze względu na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany model.


W przypadku stosowania systemu BEGO Semados® Supra nie trzeba koniecznie używać maski dziąsła.

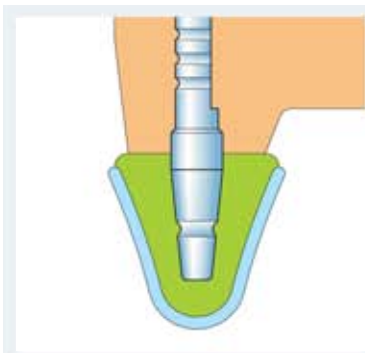

Wykonanie modelu


Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

13.2 Wykonanie modelu z wycisku pobranego metodą zamkniętą Supra-Dent

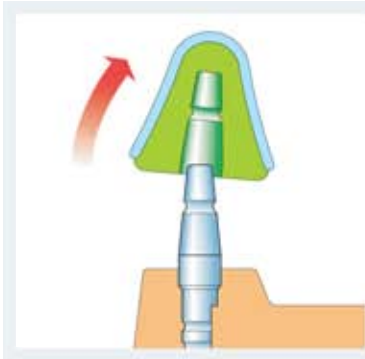

Uwalnianie modelu z wycisku

Model należy uwolnić z wycisku dopiero po całkowitym związaniu materiału użytego do wykonania modelu (przestrzegać zaleceń producenta materiału). Należy zwrócić uwagę na oś transferu wyciskowego oraz ewentualne uzębienie resztkowe.

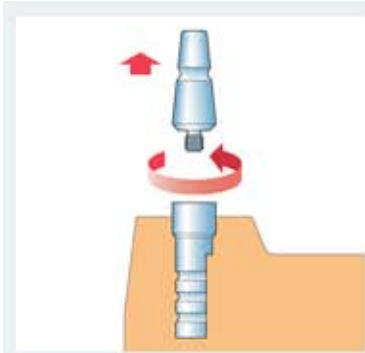

Odkręcenie transferu wyciskowego Supra

Podczas wyjmowania indywidualnej łyżki wyciskowej transfery wyciskowe pozostają na modelu. W dalszym etapie należy je odkręcić od modelu implantu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: śrubokręt do transferów wyciskowych).