

18. UZUPEŁNIENIA TYMCZASOWE NA IMPLANTACH BEGO SEMADOS® S/RI


18.1 Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - długoczasowy.

Informacje o produkcie

Łączniki tymczasowe Sub-Tec ø 5,5/7 przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane do wykonywania uzupełnień prowizorycznych, długoczasowych i/lub natychmiastowych. Aby je wykonać konieczne jest przygotowanie modelu z maską dziąsłową. Łączniki tymczasowe ø 5,5/7 nie nadają się do bezpośredniego nakładania na nie tworzywa sztucznego lub do odlewania. Zaleca się dezynfekowanie łączników tymczasowych Sub-Tec ø 5,5/7 przed umieszczeniem ich w jamie ustnej pacjenta.


W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej.

Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi ≤ 6 miesięcy.

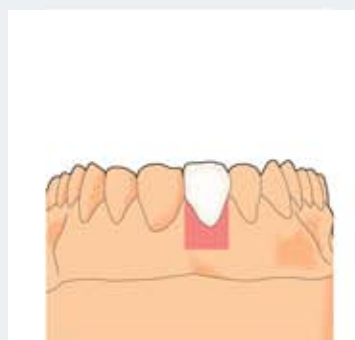


Set-up

Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

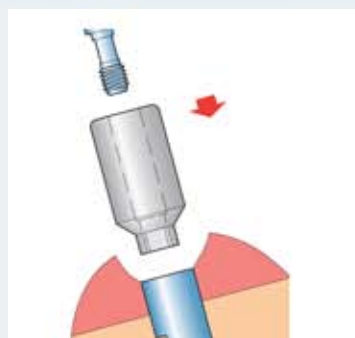

Umieszczenie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7


Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 należy przykręcić śrubą techniczną L9 (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu implantu (dokręcić ręcznie) (narzędzie: śrubokręt płaski).

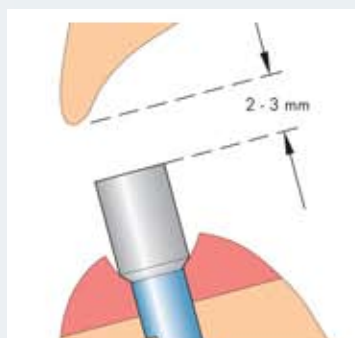

Dopasowanie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Do dopasowania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na podstawie set-up'u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej płaszczyzny zwarcia). Śrubę techniczną L9 można także w razie potrzeby skrócić do przewężenia. W takim przypadku należy przygotować sobie wcześniej nacięcie na główce śruby, potrzebne do jej przykręcenia przy pomocy śrubokręta płaskiego.

18.1 Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - długoczasowy.

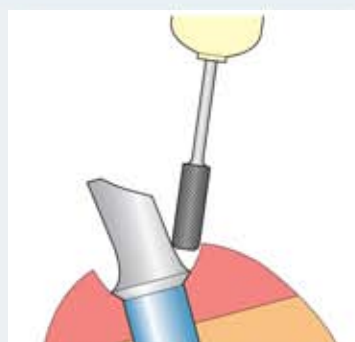

Indywidualizacja łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik należy oszlifować, dopasowując do danej sytuacji.


Uwaga: miejsce połączenia z implantem nie powinno być piaskowane ani też opracowywane. Dopasowanie tego obszaru zostało ustalone fabrycznie.



Wykonanie uzupełnienia tymczasowego, długoczasowego

Wykonać strukturę z metalu, ceramiki lub tworzywa sztucznego.


Licowanie tworzywem sztucznym lub ceramiką (przestrzegać zaleceń producenta).

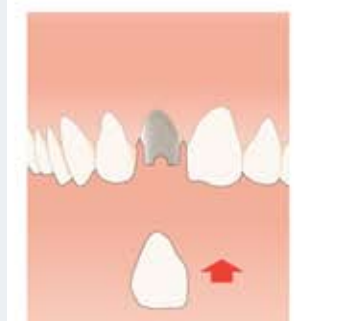

Osadzenie


Do ostatecznego osadzenia uzupełnienia przeznaczona jest śruba protetyczna Hex 1,25 mm (moment obrotowy: 15 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).

18.2 Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - uzupełnienie natychmiastowe

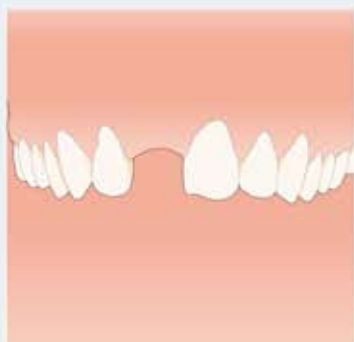


Pobranie wycisku

Pobrać wycisk przed odsłonięciem implantów i wykonać model gipsowy (przestrzegać zaleceń producenta). Można użyć także już istniejącego modelu sytuacyjnego.

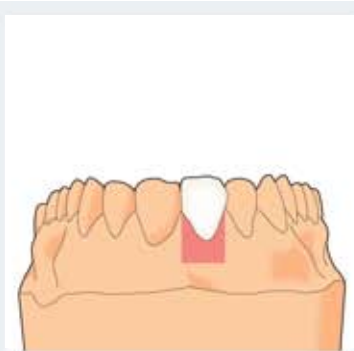

Set-Up i przygotowanie szablonu

Wykonać Set-Up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację.

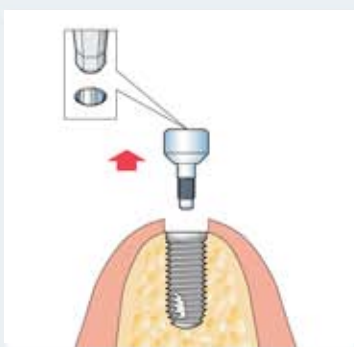

Odsłonięcie implantów

Odsłonić implanty lub odkręcić w razie potrzeby śruby gojące (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski).



Umieszczenie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 przykręcić (ręcznie dokręcając) do implantu przy pomocy śruby technicznej L9 (śruba z rowkiem podłużnym) (narzędzie: śrubokręt płaski).

18.2 Łącznik tymczasowy Sub-Tec $\varnothing$ 5,5 / 7 - uzupełnienie natychmiastowe



Indywidualizacja łącznika tymczasowego Sub-Tec $\varnothing$ 5,5/7

Łącznik należy oszlifować zgodnie z daną sytuacją. Śrubę techniczną L9 można także w razie potrzeby skrócić do przewężenia. W takim przypadku należy przygotować sobie wcześniej nacięcie na główce śruby potrzebne do jej przykręcenia przy pomocy śrubkoręta płaskiego.

Wykonanie natychmiastowego uzupełnienia tymczasowego

Wykonać prowizorium natychmiastowe na podstawie wycisku Set-Up'u przy pomocy odpowiedniego tworzywa sztucznego (przestrzegać zaleceń producenta).




Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia prowizorium przeznaczona jest śruba protetyczna Hex 1,25 mm (moment obrotowy: 15 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).

18.3 Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy


Informacje o produkcie

Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane do wykonywania uzupełnień tymczasowych pojedynczych zębów. Aby je wykonać zaleca się przygotowanie modelu z maską dziąsłową. Tymczasowe łączniki tytanowe nie nadają się do wykonywania prac przykręcanych bezpośrednio, tymczasowych koron zblokowanych, mostów, konstrukcji belkowych, trwałych uzupełnień (o czasie użytkowania > 6 miesięcy) do bezpośredniego napalania na nie ceramiki dolewania lub lutowania. Zaleca się dezynfekcję tymczasowych łączników tytanowych Sub-Tec $\varnothing$ 5,5/7 przed umieszczeniem ich w jamie ustnej pacjenta. W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej. Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi $\leq$ 6 miesięcy.

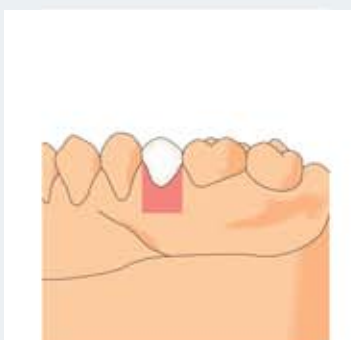


Set-Up

Wykonać Set-Up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację przy pomocy przedlewu silikonowego.

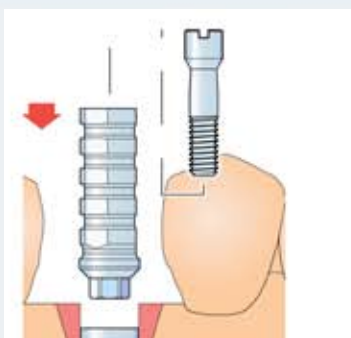

Przykręcenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec


Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec przykręcić śrubą techniczną Sub-Tec^{Plus} (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu implantu (narzędzie: śrubokręt płaski).

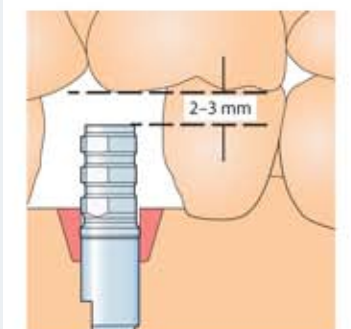

Indywidualizacja tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec

Do dopasowania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na podstawie Set-Up'u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej płaszczyzny zwarcia). W razie potrzeby zablokować podcienie zębów sąsiednich. Kanały śruby wypełnić watą, a następnie zamknąć odpowiednim materiałem.

18.3 Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy

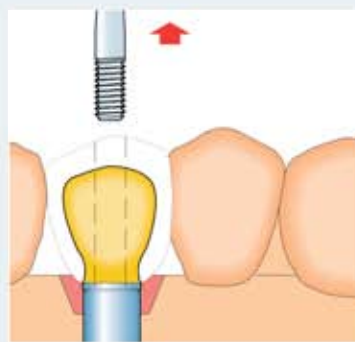

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Na tymczasowym łączniku tytanowym Sub-Tec o wstępnie przygotowanym kształcie wykonać przy pomocy odpowiedniego materiału protetycznego do wykonywania koron uzupełnienie tymczasowe (przestrzegać zaleceń producenta). Wykonać otwór na śrubę, poluzować śrubę techniczną Sub-Tec^{Plus} i odkręcić (narzędzie: śrubokręt płaski). Opracować i wypolerować uzupełnienie tymczasowe.


Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia pracy przeznaczona jest śruba protetyczna Sub-Tec^{Plus} (moment obrotowy: 30 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).

18.4 Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy, no Hex


Informacje o produkcie

Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec no Hex przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane do wykonywania uzupełnień tymczasowych w postaci zblokowanych koron i mostów. Aby je wykonać zaleca się przygotowanie modelu z maską dziąsłową. Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec noHex nie nadają się do wykonywania tymczasowych uzupełnień pojedynczych zębów, długotrwałych uzupełnień (o czasie użytkowania > 6 miesięcy) do bezpośredniego napalania na nie ceramiki dolewania lub lutowania. Zaleca się dezynfekcję tymczasowych łączników tytanowych Sub-Tec no Hex przed umieszczeniem ich w jamie ustnej pacjenta. W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej. Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi ≤ 6 miesięcy.

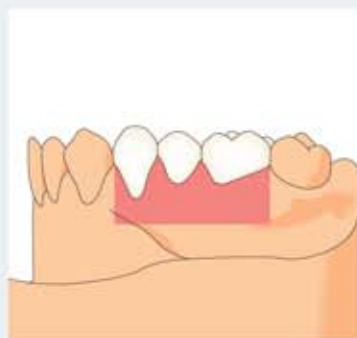


Set-up

Wykonać set-up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację przy pomocy przedlewu silikonowego.

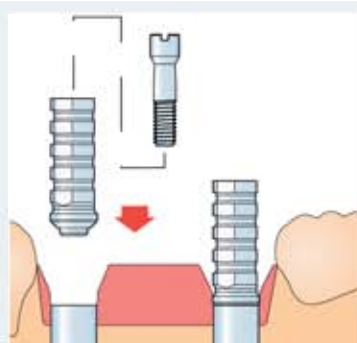

Założenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec no Hex


Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec no Hex przykręcić śrubą techniczną Sub-Tec^{Plus} (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu implantu (narzędzie: śrubokręt płaski).

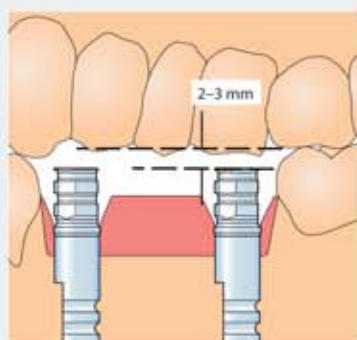

Skrócenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec no Hex

Do skracania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na podstawie Set-Up'u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej płaszczyzny zwarcia). W razie potrzeby zablokować podcienie zębów sąsiednich. Kanały śruby wypełnić watą, a następnie zamknąć odpowiednim materiałem.

18.4 Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy, no Hex

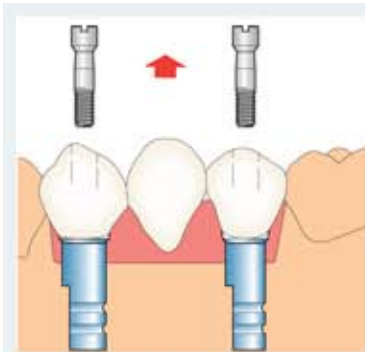

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Na tymczasowym łączniku tytanowym Sub-Tec no Hex o wstępnie przygotowanym kształcie wykonać przy pomocy odpowiedniego materiału protetycznego do wykonywania koron uzupełnienie tymczasowe (przestrzegać zaleceń producenta). Wykonać otwór na śrubę, poluzować śrubę techniczną Sub-Tec^{Plus} i odkręcić (narzędzie: śrubokręt płaski). Opracować i wypolerować uzupełnienie tymczasowe.

Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia pracy tymczasowej przeznaczona jest śruba protetyczna Sub-Tec^{Plus} (moment obrotowy: 30 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).