

## 8. WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ ŁYŻKI WYCISKOWEJ BEGO-SEMADOS®

Do wykonania łyżki należy użyć tradycyjnego materiału lub utwardzalnego światłem.



### Blokowanie podcieni na modelu

Zablokować wszystkie podcienie na modelu (1 płytką woskową grubości około 1,5 mm)



### Wykonywanie łyżki indywidualnej

Nałożyć tworzywo na model i utwardzić zgodnie z zaleceniami producenta. Zasięg łyżki zgodnie z zasadami wykonywania tradycyjnych protez kombinowanych. Obszar implantów należy obtoczyć woskiem formując walec (10 mm x 14 mm), aby stworzyć wystarczającą ilość miejsca dla transferów wyciskowych.



### Łyżka otwarta

Przeznaczona do stosowania w przypadku wycisków metodą otwartą Sub/Supra-Dent/Mini. W płycie łyżki w obszarze zablokowanych implantów należy wykonać otwór, aby stworzyć kanał dla śruby transferu wyciskowego, przy pomocy której mocowany jest transfer wyciskowy do implantu. łyżka nie może mieć ostrych krawędzi.



### Łyżka zamknięta

Przeznaczona do stosowania w przypadku wycisków metodą zamkniętą Sub/Supra-Dent. łyżka nie może mieć ostrych krawędzi.