

# VITA SMART.FIRE

Wydajny piec do napalania uzupełnień bezpośrednich (chairside)



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 07.17

VITA – perfect match.

**VITA**

## Opis produktu

VITA SMART.FIRE to specjalny piec do pracy w gabinecie – w urządzeniu tym przeprowadzamy proces krystalizacji, napalanie glazury oraz niewielkie korekty we wszystkich materiałach Chairside (do wykonywania uzupełnień natychmiastowych).

Wybór materiału i start programu odbywają się w jednym etapie. W celu wykonania prostego napalania, zainstalowano idealnie dobrane do materiałów programy. Dzięki kompaktowej budowie, piec można ustawić i użytkować w każdym gabinecie.

## VITA SMART.FIRE SYSTEM – wszystkie możliwości na pierwszy rzut oka



zintegrowany  
zestaw osprzętu

Wydajny piec do napalania  
uzupełnień natychmiastowych (chairside)

Panel sterowania

### Co?

- VITA SMART.FIRE to specjalny piec do pracy w gabinecie – w tym urządzeniu przeprowadzamy proces krystalizacji, napalanie glazury, niewielkie korekty we wszystkich materiałach Chairside (do wykonywania uzupełnień natychmiastowych).

### W jakim celu?

- Piec sterowany jest przy pomocy panelu dotykowego. W celu wykonania prostego napalania, zainstalowano idealnie dobrane do materiałów programy.

### Czym?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM zawiera piec, panel sterowania oraz zintegrowany zestaw osprzętu.

## Korzyści

### TOUCH & FIRE!

*Wybrać zainstalowany program, bezpośrednio włączyć program napalania - gotowe!*



1. intuicyjne sterowanie

2. komfortowe użytkowanie

3. niezawodne funkcje

# TOUCH & FIRE

#### Intuicyjnie

- Intuicyjna obsługa polegająca na właściwym doborze materiału i startowi programu w jednym etapie
- Klarowne menu posiada samoobjaśniające ikony programów

#### Komfortowo

- Fabrycznie zainstalowane programy do wszystkich standardowych materiałów natychmiastowych (Chairside)
- Komfortowe użytkowanie dzięki kompaktowej budowie

#### Niezawodnie

- Niezawodne funkcjonowanie dzięki niezawodnej technologii wypalania
- Solidna obudowa o trwałej powierzchni

## VITA SMART.FIRE KOMPONENTY –

Piec



Do wszystkich powszechnych programów napalania oraz materiałów

### VITA SMART.FIRE piec

Co?

- Kompaktowy piec do uzupełnień natychmiastowych o komfortowej obsłudze
- Trwała, solidna technologia napalania w celu niezawodnego funkcjonowania
- Trwała obudowa o nieprzepuszczalnej powierzchni umożliwia łatwe czyszczenie
- Wbudowana szuflada serwisowa umożliwia komfortowy dostęp do osprzętu np. podstawek do napalania
- W pełni automatyczna kalibracja temperatury zezwala na uzyskanie niezawodnych wyników

W jakim celu?

- Do wykonania kryształizacji, glazury, napalania farbek i przeprowadzania korekty

## VITA SMART.FIRE KOMPLEMENTY – Panel sterowania



### VITA SMART.FIRE panel sterowania


#### Co?

- Panel sterowania z fabrycznie zainstalowanymi programami do wszystkich popularnych materiałów Chairside
- 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, perfekcyjnej i łatwej obsłudze oraz obrazie najlepszej jakości
- Intuicyjna koncepcja obsługi w celu właściwego wyboru materiału i startu programu, który odbywa się w jednym etapie
- Przejrzyste menu z samoobjaśniającymi ikonami do szybkiego wyboru programu
- Funkcja asystenta w oprogramowaniu do procedur napalania, krok po kroku

#### W jakim celu?

- Do prostej i intuicyjnej obsługi programu napalania

## VITA SMART.FIRE KOMPONENTY – Osprzęt

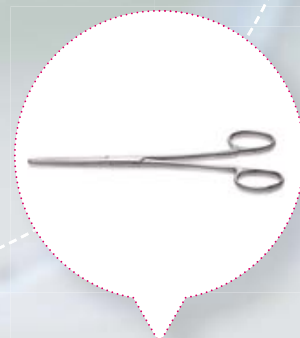

### VITA SMART.FIRE osprzęt


#### Co?

- Do pieca dołączony jest zestaw osprzętu, który umożliwia komfortową obsługę
- Części składowe: podstawka do napalania, nośnik do napalania z waty żaroodpornej, szczypce i stolik do studzenia napalonych prac

#### W jakim celu?

- W ten sposób zespół stomatologiczny nieodzwonne narzędzia ma zawsze przy piecu.


## OPIS PRODUKTU I SYSTEMU

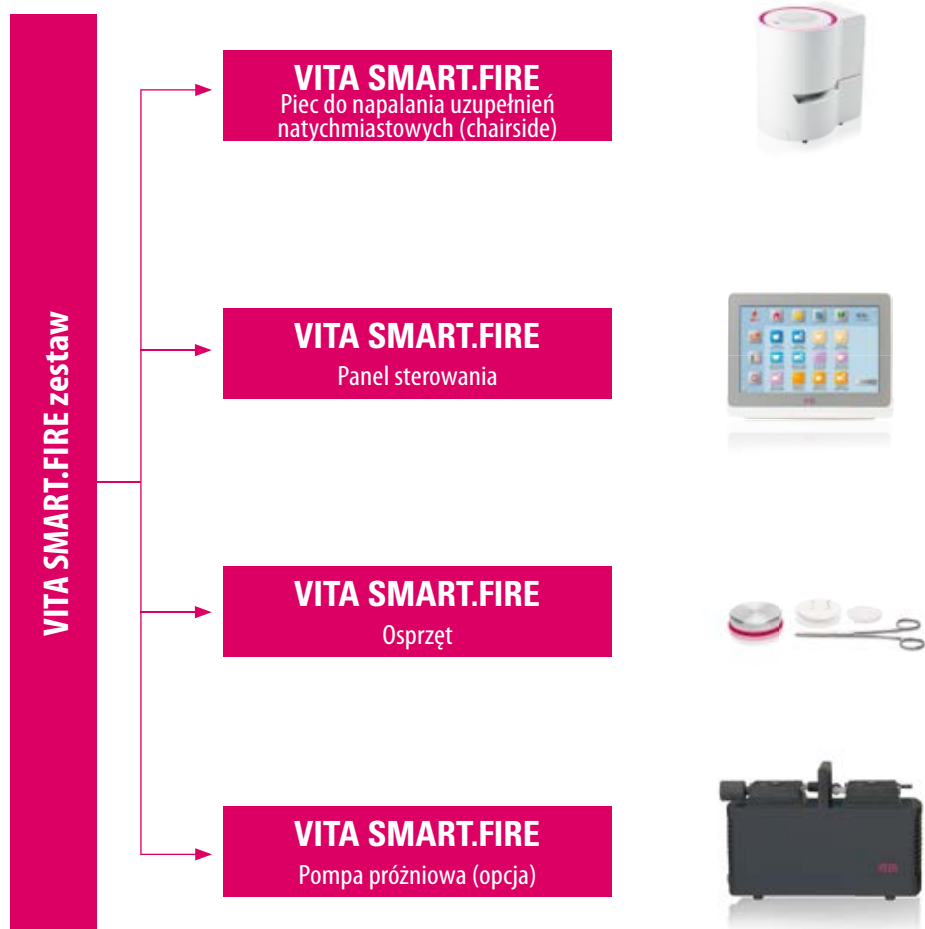

### VITA SMART.FIRE

Oznaczenie	Wymiary	Dane techniczne	Zakres dostawy	Nr. art.
Piec do napalania uzupełnień natychmiastowych (chairside)	<b>Obudowa</b> ø 230 mm głębokość: 300 mm wysokość: 340 mm <b>Komora napalania</b> ø 80 mm wysokość: 43 mm	<b>Podłączenie do sieci:</b> 230 wolt AC, 50 Hz lub 100/110 wolt AC, 50/60 Hz <b>Pobór mocy:</b> 750 W <b>Temperatura komory napalania:</b> 1050 °C	1x piec 1x zestaw osprzętu 1x instrukcja obsługi urządzenia	<b>DSF220</b> (wersja - 230V)  <b>DSF100</b> (wersja - 100V)  <b>DSF110</b> (wersja - 110V)
Panel sterowania	szerokość: 260 mm głębokość: 150 mm wysokość: 200 mm	TFT-Touch-Display - ekran dotykowy 10 cali, 1280 x 800 USB-/SD interfejs z funkcją WLAN	1x przewód do sieci elektrycznej	
Osprzęt	–	–	2x sztyfty platynowe 1x nośnik z waty żaroodpornej 1x podstawka do napalania 1x szczypce do napalonych prac 1x stolik do studzenia napalonych prac	
Pompa próżniowa (opcja)	–	–	1x pompa próżniowa 1x wąż próżniowy	<b>DVPU220</b>

Dalsze informacje dotyczące materiału VITA SMART.FIRE znajdują Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

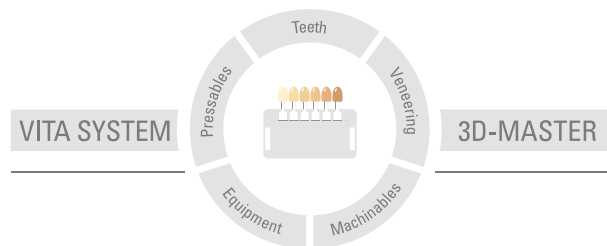

**Uwaga:** Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkownika. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu w celu kontroli przewidzianego zastosowania. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten będzie stosowany z niezgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych producentów. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.

Wydanie instrukcji obróbki materiału: 07.17

Powyższe wydanie instrukcji obróbki materiału dezaktualizuje dotychczasowe wydania Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE** jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2011/65/WE.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)