

VITA PROTHETIK ROZWIĄZANIA – ZĘBY DO PROTEZ I PROTETYKA CYFROWA

Kompendium dla pracowni



Stan z 02.18

VITA – perfect match.

VITA

VITA PROTHETIK rozwiązania – do najlepszych protez zębowych: naturalne, niezawodne, w różnych wariantach

Żywy kształt i gra kolorów w celu osiągnięcia naturalnych wyników.



VITAPAN EXCELL® (Anterior)
VITAPAN PLUS® (Anterior)
VITAPAN® LINGOFORM (Posterior)
VITA PHYSIODENS® (Anterior)
VITA PHYSIODENS® (Posterior)

Wysoka różnorodność kolorów i kształtów do wszystkich przypadków klinicznych.



VITAPAN® (Anterior)
VITAPAN® CUSPIFORM (Posterior)
VITAPAN SYNOFORM® (Posterior)



Solidna protetyka standardowa w dogodnych cenach.



VITA MFT® (Anterior)
VITA MFT® (Posterior)

Wydajna protetyka CAD/CAM w celu zwiększenia produktywności




ZĘBY VITA CAD/CAM
VITA CAD/CAM MATERIAŁY
KOMPONENTY VITA CAD/CAM

OCzekujecie najlepszych rozwiązań do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach?

Dzięki VITA PROTHETIK możemy w trakcie wykonywania protez liczyć na naturalność, bardzo dobry czynnik trwałości i dużą paletę różnorodnych wariantów. Od 1924 firma VITA łączy w sobie "100 % German Dental Engineering" niemiecką myśl inżynierską, praktyczne doświadczenia w technice dentystycznej oraz praktyczne rozwiązania protetyczne. Specjaliści firmy VITA produkują konfekcyjne zęby do protez, zarówno za pomocą nowatorskich metod, jak również systemem indywidualnym spotykany w manufakturach wg najwyższych standardów jakości. VITA proponuje wykonawstwo konwencjonalne i protetykę cyfrową do indywidualnych rozwiązań z właściwie dobranymi komponentami. W ten sposób możemy stosować konfekcję estetyczną, funkcjonalną i wydajną - zęb konfekcyjny pasujący do każdego przypadku klinicznego.

Zalecane kombinacje zębów Anterior-/Posterior

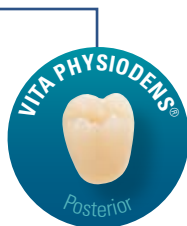



Jak wykonać najlepsze protezy zębowe?

Protetyka VITA PREMIUM oferuje wysokiej jakości zęby kompozytowe MRP o naturalnych kształtach i żywych kolorach do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz implantoprotez o wysokich walorach estetycznych.



Planowanie i pewne rozwiązywanie różnorodnych przypadków klinicznych?

VITA UNIVERSAL PROTHETIK (protetyka uniwersalna) oferuje od wielu lat sprawdzone zęby kompozytowe MRP w szerokiej palecie kształtów, które są gwarancją pewnego rozwiązywania problemów związanych z różnymi przypadkami klinicznymi.






Solidna protetyka standardowa w dogodnych cenach?

VITA BASIC PROTHETIK oferuje zęby polimerowe HC w celu tworzenia standardowych protez całkowitych i częściowych w dogodnych cenach.



Jak podnieść wydajność wprowadzając technologię cyfrową?

VITA DIGITAL PROTHETIK łączy nowatorstwo, wydajność i precyzję dzięki precyzyjnie dobranym materiałom i rozwiązaniom systemowym CAD/CAM w celu wykonywania protez całkowitych.

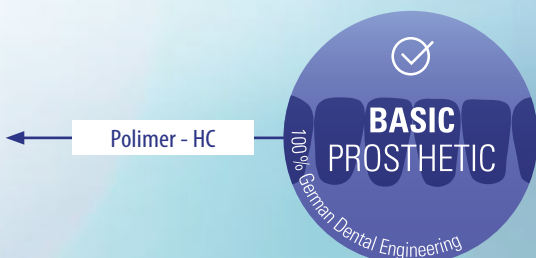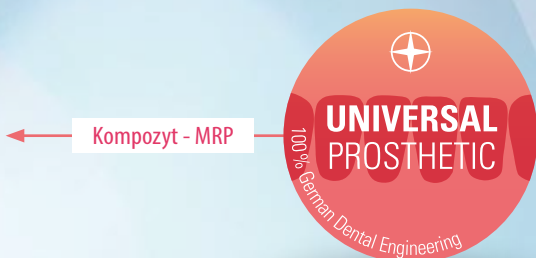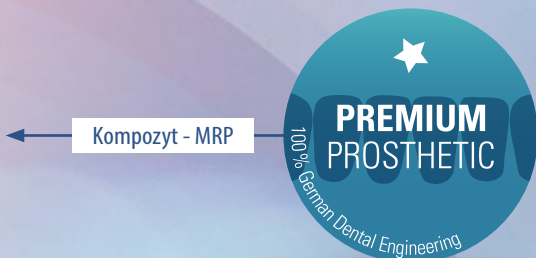

VITA PROTHETIK – rozwiązania protetyczne – przegląd zakresu zastosowania

	VITAPAN EXCELL Anterior	VITAPAN PLUS Anterior	VITA PHYSIODENS Anterior
	VITAPAN LINGOFORM Posterior		VITA PHYSIODENS Posterior
Wykonawstwo protez całkowitych	●	●	
Wykonawstwo protez częściowych	●	●	●
Wykonawstwo protez kombinowanych			●
Implantoprotetyka	●	●	
Protetyka wieku podeszłego			
	VITAPAN Anterior		
	VITAPAN CUSPIFORM Posterior	VITAPAN SYNOFORM Posterior	
Wykonawstwo protez całkowitych	●		
Wykonawstwo protez częściowych	●		
Wykonawstwo protez kombinowanych			
Implantoprotetyka			
Protetyka wieku podeszłego		●	
	VITA MFT Anterior		
	VITA MFT Posterior		
Wykonawstwo protez całkowitych	●		
Wykonawstwo protez częściowych	●		
Wykonawstwo protez kombinowanych			
Implantoprotetyka			
Protetyka wieku podeszłego			
	VITA DIGITAL PROSTHETIC		
	●		
Wykonawstwo protez całkowitych	●		
Wykonawstwo protez częściowych			
Wykonawstwo protez kombinowanych			
Implantoprotetyka			
Protetyka wieku podeszłego			



Dzięki VITA PROTHETIK możemy w trakcie wykonywania protez liczyć na naturalność, bardzo dobry czynnik trwałości i dużą paletę różnorodnych wariantów.

100 % German Dental Engineering by VITA – dla najlepszej protetyki ze względu na kształt, kolor i funkcję!



VITA - niemiecka inżynieria

Inżynierowie firmy VITA wspólnie z technikami dentystycznymi wprowadzają najwyższe standardy technologiczne, w celu wdrażania praktycznych rozwiązań protetycznych.



W celu osiągnięcia najwyższego standardu

Zęby konfekcyjne VITA są produkowane przy pomocy nowoczesnych technologii oraz indywidualnego systemu manufakturowego.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM



ŻYWY KSZTAŁT I GRA KOLORÓW W CELU OSIĄGNIĘCIA NATURALNYCH WYNIKÓW.

Jak wykonać najlepsze protezy zębowe?

Protetyka VITA PREMIUM oferuje wysokiej jakości zęby kompozytowe MRP o naturalnych kształtach i żywych kolorach do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz implantoprotez o wysokich walorach estetycznych.

› PRZEGLĄD ZĘBÓW KONFEKCYJNYCH

Zalecane kombinacje zębów Anterior-/Posterior



Dla znakomitej witalności kształtu, koloru i gry światła.




Do tworzenia protetyki dla młodych pacjentów z uwypukloną żywą przeziernością.



W celu tworzenia protetyki doskonałej w każdym detalu, bogatej w wielostronną grę kształtów.



Do wszystkich koncepcji protetycznych dzięki wielofunkcyjnym powierzchniom żującym.

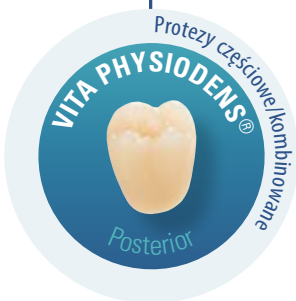

Do najlepszej reprodukcji funkcji dzięki naturalnej morfologii.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM



kształty naturalne
i uwypuklone

jaskrawa gra
kolorów/światła

Dla znakomitej witalności kształtu, koloru i gry światła.



> FACTS & FEATURES

Co?

- wyklesponowane, żywe i przeziernie zęby przednie Premium z kompozytu MRP

Korzyści?

- **proste wykonawstwo bardzo estetycznej protetyki**, dzięki naturalnemu kształtowi zęba o „złoty” proporcjach
- **tworzenie gry kolorów i światła dzięki znakomitej dynamice** światła i harmonicznemu przebiegowi kolorów
- **dobra reprodukcja koloru względem naturalnego uzębienia resztkowego**, dzięki bardzo dobrej zgodności kolorów z kolornikiem
- **znakomita odporność na obciążenia** i stabilność pod względem abrazji
- **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania dzięki znakomitej** homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu?

- nadają się znakomicie do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach.

dalsze dane dotyczące produktu >

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- naturalny i żywy kształt zębów w celu osiągnięcia najlepszych wyników
- uwypuklona charakterystyka obszaru siecznego w celu osiągnięcia szczególnie żywego uzupełnienia
- szerokie listwy podniebienne do tworzenia idealnego obszaru międzyzębowego/ kształtowania brodawek dziąsłowych

szczególne cechy charakterystyczne

- uwypuklony obszar szklista i przeziernie listwy brzeżne w celu osiągnięcia dobrej dynamiki światła
- tekstura powierzchni pełna niuansów w celu stworzenia żywej gry światła
- zintegrowana struktura mamelonów i białawy brzeg sieczny to naturalna projekcja kolorów
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg stref barwnych

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy całkowite i częściowe
- protezy osadzone na implantach

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC

Dostępne kolory?

- **11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory**
0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
- **15 x VITA classical A1–D4® kolory**
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 17 x kształty zębów przednich – szczeka (podział na cztery grupy kształtów)
- 5 x kształty zębów przednich – szczeka



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

szczeka-Anterior						
 kształt łopaty	O41  9,1 7,4	O43  9,1 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O49  10,9 9,0	O51  12,3 9,3
	T42  9,5 7,7	T44  9,9 8,1	T46  10,4 8,2	T47  10,9 8,5	T48  11,3 8,8	T50  11,6 9,2
	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,7 8,9			
	S46  10,3 8,5					
 kształt trójkąta						T54  12,7 9,8
 kształt prostokątny						
 kształt kwadratowy						
żuchwa-Anterior						
	L33  8,6 5,0	L35  9,0 5,2	L37  9,4 5,2	L39  9,8 5,9	L41  10,2 6,2	

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach:

- VITAPAN EXCELL Anterior w połączeniu z VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITAPAN EXCELL Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

VITAPAN EXCELL Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8

S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN EXCELL karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN EXCELL Anterior



VITAPAN EXCELL magazyn zębów


- X-Small*: 67 garniturów / 402 Anterior
- Small*: 134 garniturów / 804 Anterior
- Medium*: 268 garniturów / 1.608 Anterior
- Large*: 400 garniturów / 2.400 Anterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4*
i VITA SYSTEM 3D-MASTER**. **

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

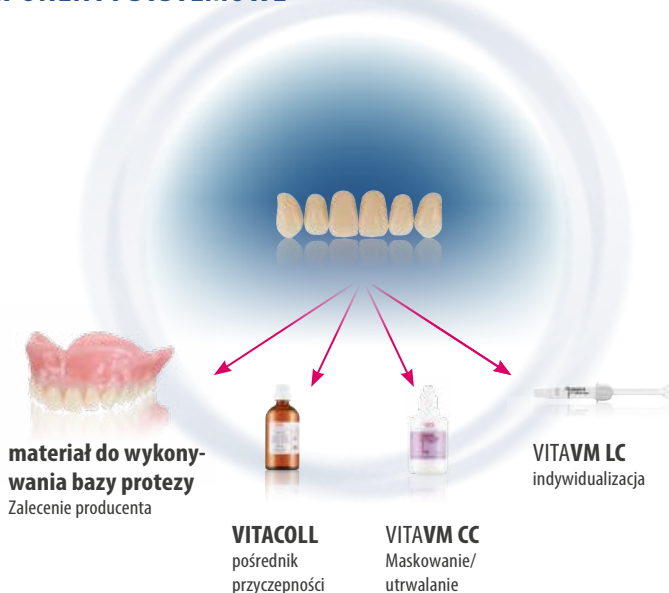



młodzieńcze-żywe
kształty

wysoki stopień
przezierności

Do tworzenia młodzieńczej protetyki z uwypukloną żywą przeziernością



> FACTS & FEATURES

Co?

- żywe w wyglądzie zęby przednie Premium o znakomitej przezierności.

Korzyści?

- **żywa gra światła**
dzięki wyjątkowej przezierności i podwyższonej ilości szkliwa
- **prosta rekonstrukcja młodzieńczej estetyki dzięki żywym**
i młodzieńczym kształtom zębów
- **znakomita odporność i stabilność**
pod względem abrazji
- **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania dzięki**
znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu?

- nadają się znakomicie do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach.

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- młodzieńczy kształt zęba do „młodzieńczej protetyki”
- uwypuklona charakterystyka obszaru siecznego w celu osiągnięcia efektu szczególnie żywego uzupełnienia
- szerokie listwy podniebienne do tworzenia idealnego obszaru międzyzębowego/ kształtowania brodawek dziąsłowych

szczególne cechy charakterystyczne

- duża ilość szkliva/przeziernie listwy brzeżne w celu osiągnięcia najlepszej transmisji światła
- tekstura powierzchni pełna niuansów w celu stworzenia żywej gry światła
- zintegrowana struktura mamelonów i białawy brzeg sieczny to naturalna projekcja kolorów
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg warstw kolorów

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy całkowite i częściowe nacechowane młodzieńczą estetyką
- protezy osadzone na implantach

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkie popularnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC

Dostępne kolory?

• 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory

0M1, 0M3, 1M1–5M3

• 15 x VITA classical A1–D4® kolory

A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 18 x kształty zębów przednich – szczeka (podział na cztery grupy kształtów)
- 6 x kształty zębów przednich – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

szczeka-Anterior							
 kształt łopaty	O41  9,1 7,4	O43  9,1 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O47L*  10,3 8,6	O49  10,9 9,0	O51  12,3 9,3
 kształt trójkąta	T42  9,5 7,7	T44  9,9 8,1	T46  10,4 8,2	T47  10,9 8,5	T48  11,3 8,8	T50  11,6 9,2	T54  12,7 9,8
 kształt prostokątny	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,7 8,9				
 kształt kwadratowy	S46  10,3 8,5						
żuchwa-Anterior							
	L33  8,6 5,0	L35  9,0 5,2	L37  9,4 5,2	L37L*  9,4 5,2	L39  9,8 5,9	L41  10,2 6,2	

*) O47Llub L37L = kształt zęba z dłuższą szyjką

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach:

- VITAPAN EXCELL Anterior w połączeniu z VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITAPAN PLUS Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
047L* 47,3	L37L* 37,3	22L 31,6	22L 32,1
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

VITAPAN PLUS Anterior		VITAPAN LINGOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8

S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN PLUS karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN PLUS Anterior
- VITAPAN PLUS Anterior i VITAPAN LINGOFORM Posterior



VITAPAN PLUS magazyn zębów


- X-Small*: 67 garniturów / 402 Anterior
- Small*: 134 garniturów / 804 Anterior
- Medium*: 268 garniturów / 1.608 Anterior
- Large*: 400 garniturów / 2.400 Anterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

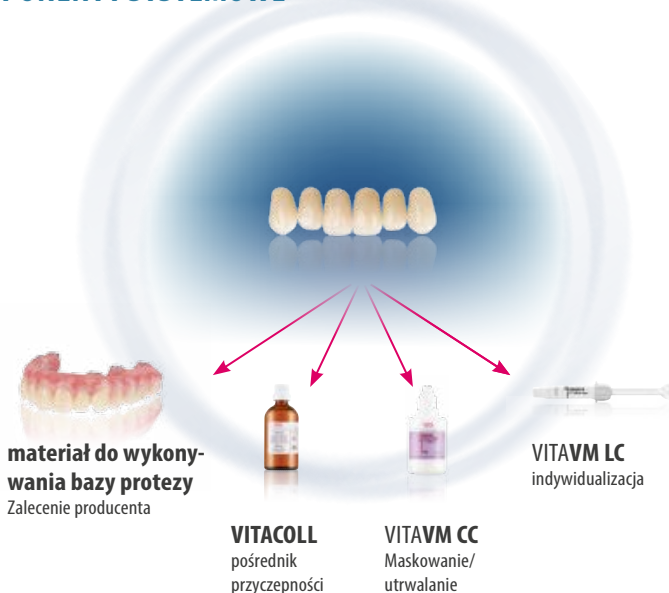



wielofunkcyjna
powierzchnia
żująca

dokładnie zdefiniowane
zwarcie centryczne

Do wszystkich koncepcji protetycznych dzięki wielofunkcyjnym powierzchniom żującym.



> FACTS & FEATURES

Co?

- wyeksponowane kształty wielofunkcyjnych zębów bocznych Premium z kompozytu MRP

Korzyści?

- **proste, intuicyjne ustawianie dzięki „automatycznemu” odnajdywaniu zwarcia** centrycznego i ukształtowaniu powierzchni wg zasady "przekładni zębatych"
- **uniwersalne, niezawodne, znajdujące zastosowanie we wszystkich koncepcjach** protetycznych dzięki wielofunkcyjnemu kształtowi powierzchni żujących
- **oszczędność czasu w trakcie ustawiania zębów**
bez dodatkowego szlifowania dzięki dokładnie zdefiniowanemu zwarciu centrycznemu
- **znakomita odporność dzięki dużej wytrzymałości, odporności i stabilności** pod względem abrazji oraz funkcji wspomagającej zwarcie centryczne
- **bardzo dobre możliwości obróbki**
dzięki znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu?

- nadają się znakomicie do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach.

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- wyeksponowane kształty powierzchni językowej i policzkowej, wymiarami zbliżone do kształtu zębów naturalnych
- wielofunkcyjna powierzchnia żująca posiada zdefiniowane kontakty zgryzu centrycznego

szczególnie cechy charakterystyczne

- delikatna tekstura powierzchni pełna niuansów w celu stworzenia żywej gry światła
- szczęka-nachylenie guzków: około 15° do 20°

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy całkowite i częściowe
- protezy osadzone na implantach

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC



W szczególności stosujemy do:
językowych koncepcji okluzyjnych

Dostępne kolory?

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 4x kształty zębów bocznych – szczęka
- 4x kształty zębów bocznych – żuchwa

> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

Posterior				
21L	22L	23L	24L	
9,6	10,0	10,9	11,0	
				
				
10,0	10,2	10,8	11,2	

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Do wykonywania protez całkowitych, częściowych oraz protez osadzonych na implantach:

- VITAPAN LINGOFORM Posterior z VITAPAN EXCELL Anterior
- tabela porównawcza kombinacji z VITAPAN EXCELL Anterior

lub

- VITAPAN LINGOFORM Posterior z VITAPAN PLUS Anterior
- tabela porównawcza kombinacji z VITAPAN PLUS Anterior



ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN LINGOFORM karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN LINGOFORM Posterior



VITAPAN LINGOFORM magazyn zębów


- X-Small*: 50 garniturów/400 Posterior
- Small*: 100 garniturów/800 Posterior
- Medium*: 200 garniturów/1.600 Posterior
- Large*: 300 garniturów/2.400 Posterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

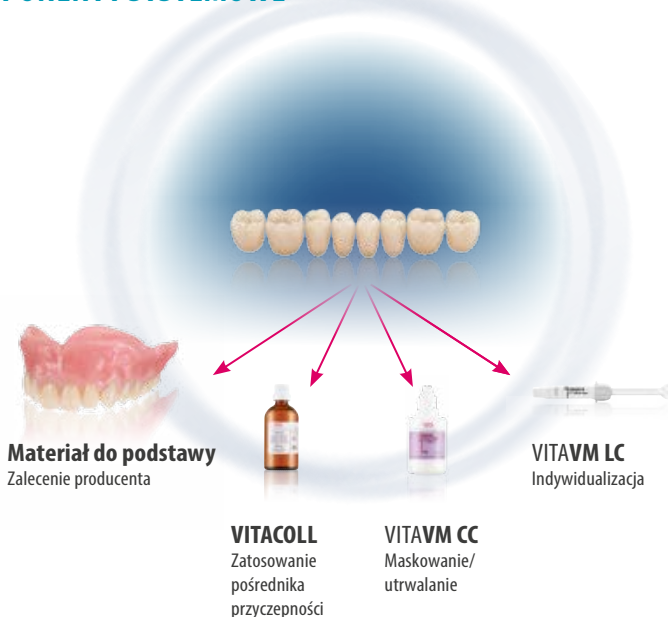



wyeksponowane
żywe kształty

naturalne
oddziaływanie
koloru

w celu tworzenia protetyki doskonałej w każdym detalu i bogatej w wielostronną grę kształtów



> FACTS & FEATURES

Co? • wyeksponowane kształty wielofunkcyjnych zębów przednich Premium z kompozytu MRP

Korzyści? • **prosta rekonstrukcja naturalnej estetyki, dzięki wielorakim naturalnym** kształtom umożliwiającym dobrą integrację z pozostałym uzębieniem pacjenta
• **dobra reprodukcja koloru względem naturalnego uzębienia resztkowego,** dzięki zgodności kolorów z kolornikiem i dużej możliwości doboru koloru
• **niezawodne maskowanie suprastruktur,** dzięki dużej objętości zęba u podstawy
• **naturalne oddziaływanie koloru, dzięki zintegrowanemu** przebiegowi koloru w 3D, teksturze powierzchni i dobrej transmisji światła
• **znakomita odporność i stabilność** pod względem abrazji

W jakim celu? • najlepsze rozwiązania dla wykonawstwa protez częściowych i kombinowanych

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- wyeksponowany, naturalny kształt zęba w celu dobrej integracji z uzupełnieniem resztkowym
- żywa, efektowna charakterystyka obszaru siecznego i naturalna krzywizna wargowa
- szeroka szyjka zęba do tworzenia idealnego obszaru międzyzębowego/kształtowania brodawek dziąsłowych
- powiększona objętość zęba u podstawy w celu niezawodnego maskowania suprastruktur

szczególne cechy charakterystyczne

- dopasowana chromatyczność w celu dobrego maskowania suprastruktur
- wielopłaszczyznowa powierzchnia pełna niuansów w celu stworzenia żywej gry światła
- struktura warstw w 3D w celu tworzenia naturalnego przebiegu kolorów

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- Protezy częściowe
- protezy szkieletowe, protezy z zasuwaniami i konstrukcjami kładkowymi
- protezy na teleskopach i koronach stożkowych (konus)

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?



Szczególne zastosowanie znajdują w:

BLP (BIO-logicznej protetyce) – dr. E. End

Dostępne kolory?





- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 21 x kształty zębów przednich – szczęka
(podział na cztery grupy kształtów)
- 8 x kształty zębów przednich – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

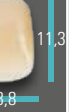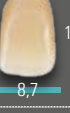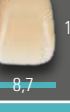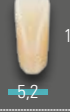szczeka-Anterior						
 kształt łopaty	01S*  10,8 7,6	02L  11,5 8,4	03M  10,8 8,6	04L  12,7 9,0	05L  11,4 9,1	06L  13,1 9,7
	T6S**  10,4 7,4	T2S*  10,1 8,3	T1S  10,2 8,7	T3M  11,7 8,4	T4M*  11,3 8,8	T5M  11,1 8,8
 kształt trójkąta	T7M  11,6 8,8	T8L*  11,6 9,2	T9L  13,1 9,4			
	X1M*  11,0 8,8	X2L  11,6 8,7	X3L  11,8 9,0			
 kształt prostokątny	Z1S  9,8 8,1	Z2S  10,1 8,7				
 kształt kwadratowy						
żuchwa-Anterior						
	L1S*  8,8 4,9	L2M*  10,4 5,2	L3M*  10,5 5,2	L4M*  9,4 5,4	L5M*  10,4 5,5	L6L  11,4 5,8
	L8L  13,0 6,3					L7L  10,4 5,5

*) dostępne kolory zębów wybielonych 0M1 i 0M3 przyporządkowane wyłącznie do wybranych kształtów

**) kształty dostępne tylko w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA PHYSIODENS®

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Rozwiązania do wykonywania protez częściowych i kombinowanych

• VITA PHYSIODENS Anterior z VITA PHYSIODENS Posterior

VITA PHYSIODENS Anterior		VITA PHYSIODENS Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
01S 42,3	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
02L 45,7	L2M 34,5	22E 32,9	22E 33,7
03M 47,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
04L 49,2	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1
05L 50,1	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1
06L 51,3	L8L 43,5	25E 36,7	25E 37,3

T6S 41,0	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
T2S 44,9	L2M 34,5	21E 30,5	21E 32,7
T1S 45,3	L1S 33,0	20E 29,4	20E 31,0
T3M 45,6	L3M 36,3	22E 32,9	22E 33,7
T4M 45,6	L4M 35,5	22E 32,9	22E 33,7

VITA PHYSIODENS Anterior		VITA PHYSIODENS Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
T5M 46,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
T6L 47,3	L5M 37,0	23E 33,5	23E 34,6
T7M 47,5	L7L 38,2	23E 33,5	23E 34,6
T8L 49,0	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
T9L 49,6	L6L 38,2	25E 36,7	25E 37,3

X1M 46,3	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
X2L 46,2	L4M 35,5	23E 33,5	23E 34,6
X3L 47,8	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1

Z1S 44,1	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
Z2S 47,5	L5M 37,0	22E 32,9	22E 33,7

Informacje, które znajdują się w tabeli prac kombinowanych są wartościami orientacyjnymi i mogą się zmieniać wg indywidualnego przypadku klinicznego danego pacjenta.

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITA PHYSIODENS karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITA PHYSIODENS Anterior i Posterior



VITA PHYSIODENS magazyn zębów

Anterior:


- X-Small*: 67 garniturów / 402 Anterior
- Small*: 134 garniturów / 804 Anterior
- Medium*: 268 garniturów / 1.608 Anterior
- Large*: 400 garniturów / 2.400 Anterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy dopomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

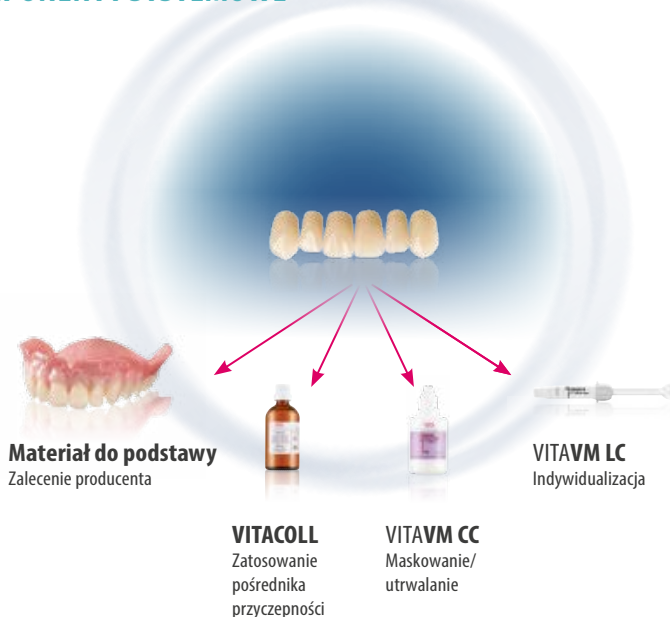



wyeksponowane
żywe kształty

znakomita
odporność

Do najlepszej reprodukcji funkcji dzięki naturalnej morfologii.



> FACTS & FEATURES

Co?

- wyeksponowane kształty wielofunkcyjnych zębów bocznych Premium z kompozytu MRP

Korzyści?

- **prosta rekonstrukcja naturalnej funkcji żucia**,
dzięki wielorakim naturalnym kształtom i naturalnej morfologii
- **dobra reprodukcja koloru względem naturalnego uzębienia resztkowego**,
dzięki zgodności kolorów z kolornikiem i szerokiej możliwości wyboru
- **niezawodne maskowanie suprastruktur**,
dzięki dużej objętości zęba u podstawy
- **znakomita odporność na obciążenia**
i stabilność pod względem abrazji
- **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania**
dzięki znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu? • najlepsze rozwiązania dla wykonawstwa protez częściowych i kombinowanych

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- wyeksponowany kształt zęba dzięki zastosowaniu naturalnych wymiarów zęba
- relief powierzchni żującej /guzków wg naturalnej anatomii zęba

szczególne cechy charakterystyczne

- duża objętość zęba u podstawy
- szczęka-nachylenie guzków: około $> 30^\circ$

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- Protezy częściowe
- protezy szkieletowe, protezy z zasuwami i konstrukcjami kładkowymi
- protezy na teleskopach i koronach stożkowych (konus)

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?



Szczególne zastosowanie znajdują w:

BLP (BIO-logicznej protetyce) – dr. E. End

Dostępne kolory?

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 6 x kształty zębów bocznych – szczęka
- 6 x kształty zębów bocznych – żuchwa





POSTERIOR

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

**VITA
PHYSIODENS**

VITAPAN
VITA

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM

[dalsze dane dotyczące produktu >](#)

> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

Posterior						
20E	21E*	22E*	23E*	24E*	25E	
8,9	9,5	9,5	11,1	11,8	11,2	
						
						
8,3	8,7	9,0	9,8	9,8	9,5	

*) dostępne w kolorze zębów wybielonych OM3 przyporządkowane wyłącznie do wybranych kształtów.

> ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Rozwiązania do wykonywania protez częściowych i kombinowanych

- VITA PHYSIODENS Posterior z VITA PHYSIODENS Anterior
- tabela porównawcza kombinacji z VITA PHYSIODENS Anterior

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITA PHYSIODENS karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITA PHYSIODENS Anterior i Posterior



VITA PHYSIODENS magazyn zębów

Posterior:


- X-Small*: 50 garniturów/400 Posterior
- Small*: 100 garniturów/800 Posterior
- Medium*: 200 garniturów/1.600 Posterior
- Large*: 300 garniturów/2.400 Posterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy dopomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

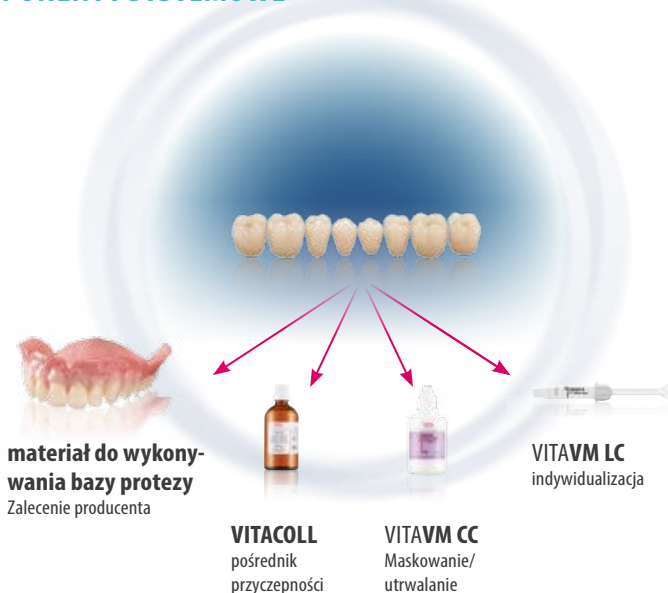




NAJLEPSZA RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW I KSZTAŁTÓW DO WSZYSTKICH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH.

Planowanie i pewne rozwiązywanie różnorodnych przypadków klinicznych?
VITA UNIVERSAL PROTHETIK (prtesyka uniwersalna) oferuje od wielu lat sprawdzone zęby kompozytowe MRP w szerokiej palecie kształtów, które są gwarancją pewnego rozwiązywania problemów związanych z różnymi przypadkami klinicznymi.

› PRZEGLĄD ZĘBÓW KONFEKCYJNYCH

Zalecane kombinacje zębów Anterior-/Posterior

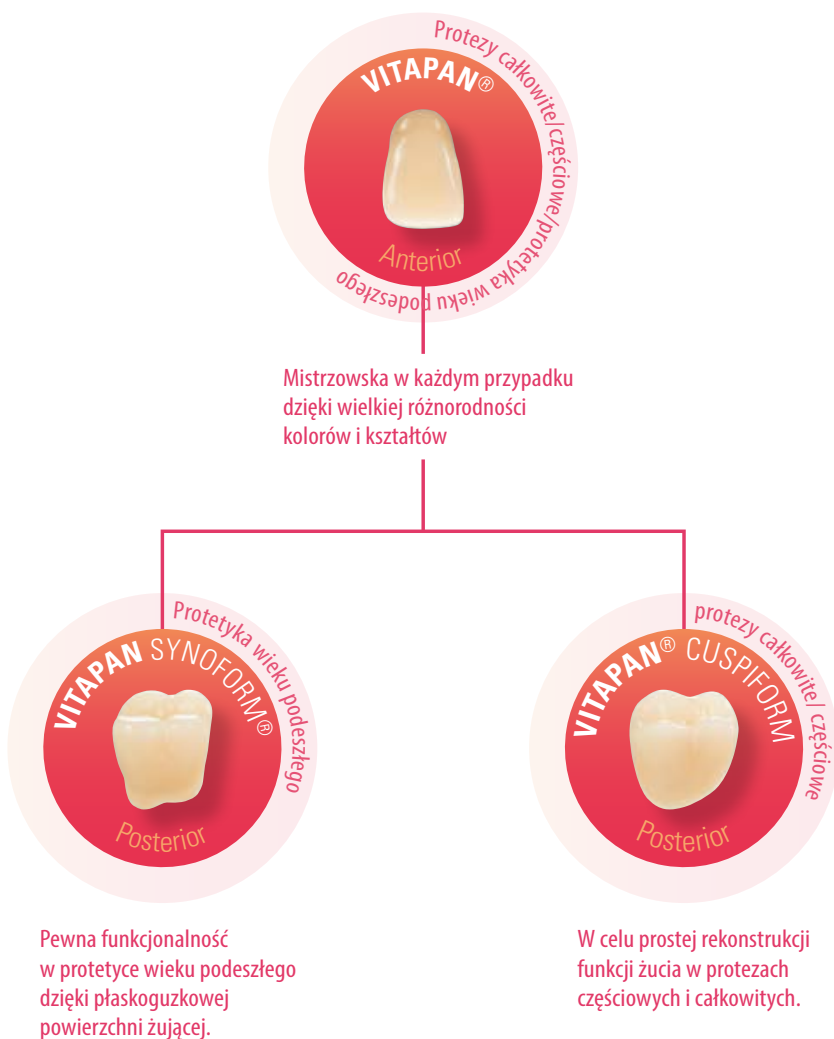



adekwatne do wieku
pacjenta – uwypuklone
kształty

duża różnorodność kolorów
i kształtów do wszystkich
przypadków klinicznych

Do każdego przypadku klinicznego, dzięki wielkiej różnorodności kolorów i kształtów.



> FACTS & FEATURES

Co?


- adekwatne do wieku pacjenta - charakterystyczne i uniwersalne zęby przednie z kompozytu MRP

Korzyści?

- **proste wykonawstwo adekwatnych do wieku pacjenta protez całkowitych/częściowych**, dzięki różnorodności charakterystycznych kształtów
- **dobra reprodukcja koloru względem naturalnego uzębienia resztkowego**, dzięki zgodności kolorów z kolornikiem i szerokiej możliwości wyboru
- **naturalne oddziaływanie koloru**, dzięki zintegrowanemu przebiegowi koloru w 3D od szyjki po obszar sieczny
- **znakomita odporność i stabilność** pod względem abrazji
- **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania** dzięki znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu? • Uniwersalne rozwiązania dla protez całkowitych, częściowych i protetyki wieku podeszłego

> PODSTAWOWE INFORMACJE

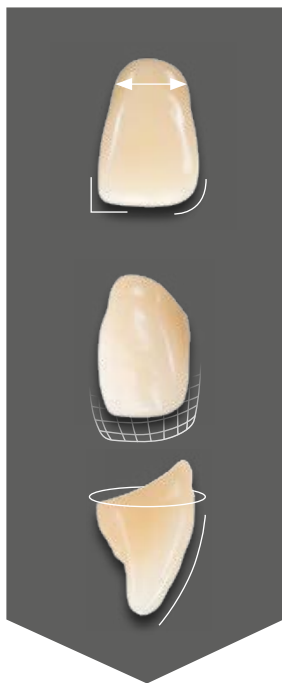

Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- adekwatny do wieku, charakterystyczny kształt zębów do protez całkowitych/częściowych
- płaska, naturalnie abrazyjna charakterystyka powierzchni siecznej
- wąska szyjka zęba

szczególne cechy charakterystyczne

- wyważony balans między chromatycznością i przeziernością
- proporcjonalna struktura powierzchni z typowymi cechami adekwatnymi do danej grupy wiekowej
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg stref barwnych

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy całkowite i częściowe
- protezy wieku podeszłego
- uzupełnienia w obszarach o niewielkiej ilości miejsca

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC

Dostępne kolory?


- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 31 x kształty zębów przednich – szczeka (podział na cztery grupy kształtów)
- 13 x kształty zębów przednich – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

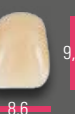szczeka-Anterior							
 kształt łopaty	013  9,5 7,9	025  9,9 8,1	034  9,7 8,0	035  9,8 8,0	043  9,4 8,2	086  9,9 8,9	097  11,5 9,0
	098*  11,8 9,0	099  12,5 9,8					
 kształt trójkąta	T36*  10,1 8,1	T53  9,2 8,1	T56  10,0 8,3	T66  10,2 8,3	T67  10,0 8,4	T76*  10,4 8,2	T77*  10,6 8,5
	T88*  10,6 8,7	T98  10,8 9,3	T99  11,1 9,0				
 kształt prostokątny	X13  9,3 7,7	X66  10,1 8,9	X77  10,1 8,5	X87  10,1 8,9	X96  10,0 9,3	X99  12,7 9,4	
	Z51  8,8 8,3	Z61  8,7 8,2	Z74  9,6 8,8	Z84  9,4 8,7	Z85  9,7 8,6	Z97  10,2 9,5	
 kształt kwadratowy							

*) dostępne kolory zębów wybielonych 0M1 i 0M3 przyporządkowane wyłącznie do wybranych kształtów

> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

żuchwa-Anterior							
W pełni ukształtowany brzeg sieczny	L3  8,0 -5,0	L5*  9,2 -5,2	L5L  9,9 -5,1	L7*  8,7 -5,4	L9  9,0 -5,6	L11*  9,1 -5,7	L13  8,7 -5,6
	L15  12,2 -5,7						
Abrazyjny brzeg sieczny	L4*  8,3 -4,7	L8  9,8 -5,8	L10  9,2 -5,9	L12  9,8 -6,2	L14  10,9 -6,1		

*) dostępne kolory zębów wybielonych 0M1 i 0M3 przyporządkowane wyłącznie do wybranych kształtów

> ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Rozwiązania do wykonywania protez częściowych i kombinowanych

- VITAPAN Anterior w połączeniu z VITAPAN CUSPIFORM Posterior

Protetyka wieku podeszłego:

- VITAPAN Anterior w połączeniu z VITAPAN SYNOFORM Posterior

VITAPAN Anterior		VITAPAN CUSPIFORM Posterior		VITAPAN SYNOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
013 41,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
025 42,8	L3 33,4	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5

VITAPAN Anterior		VITAPAN CUSPIFORM Posterior		VITAPAN SYNOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
034 43,3	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
035 43,2	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
043 43,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
086 47,1	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
097 49,2	L8 38,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
098 48,1	L13 37,0	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
099 52,5	L14 41,7	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T36 43,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
T53 44,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T56 44,4	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T66 44,6	L5 35,3	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T67 45,1	L4 32,7	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T76 45,9	L7 36,2	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T77 46,2	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T88 47,1	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4

Dalsze kombinacje znajdują
Państwo na następnej
stronie. >

› ZALECANE KOMBINACJE

VITAPAN Anterior		VITAPAN CUSPIFORM Posterior		VITAPAN SYNOFORM Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
T98 50,5	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T99 48,0	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X13 41,5	L4 32,7	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
X66 45,9	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X77 47,0	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X87 46,9	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X96 50,0	L10 39,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X99 50,6	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
Z51 44,6	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	13S 31,3	13S 33,9
Z61 45,5	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	12S 31,1	12S 32,7
Z74 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z84 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z85 47,5	L13 37,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
Z97 52,2	L12 41,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Informacje, które znajdują się w tabeli prac kombinowanych są wartościami orientacyjnymi i mogą się zmieniać wg indywidualnego przypadku klinicznego danego pacjenta.

> ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN karta kształtów-

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN Anterior



VITAPAN magazyn zębów

- X-Small*: 67 garniturów / 402 Anterior
- Small*: 134 garniturów / 804 Anterior
- Medium*: 268 garniturów / 1.608 Anterior
- Large*: 400 garniturów / 2.400 Anterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

> KOMPONENTY SYSTEMOWE





UNIVERSAL
PROSTHETIC



uwypuklony relief
powierzchni
żującej

znakomita
odporność

W celu uzyskania prostej rekonstrukcji funkcji żucia w protezach częściowych i całkowitych.



> FACTS & FEATURES

Co?

- delikatne zęby boczne z uwypuklonym reliefem powierzchni żującej wykonane z kompozytu MRP

Korzyści?

- **prosta rekonstrukcja funkcji żucia w protezach częściowych i całkowitych**, dzięki uwypuklonemu reliefowi powierzchni żującej w celu uzyskania dobrego zwarcia centrycznego i zaguzkowania
- **znakomita odporność i stabilność** pod względem abrazji
- **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania** dzięki znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu? • Uniwersalne rozwiązania dla protez całkowitych/ częściowych

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- wąskie, delikatne kształty zębów bez ograniczeń dla języka i efektywnej wydajności żucia
- uwypuklone powierzchnie żujące /relief guzków w celu osiągnięcia dobrego zwarcia centrycznego i zaguzkowania

szczególne cechy charakterystyczne

- szczęka-nachylenie guzków: około 15° do 20°
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg stref barwnych

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy całkowite i częściowe
- uzupełnienia w obszarach o niewielkiej ilości miejsca

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji jezykowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC



W szczególności stosujemy do:

policzkowych koncepcji okluzyjnych:

Dostępne kolory?

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 6 x kształty zębów bocznych – szczęka
- 6 x kształty zębów bocznych – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

Posterior						
40C	41C*	42C*	43C	44C*	45C	
7,8	8,4	8,3	8,5	9,1	9,4	
						
7,6	8,0	8,0	8,1	8,7	8,6	
						

*) dostępne w kolorze zębów wybielonych OM3 przyporządkowane wyłącznie do wybranych kształtów.

> ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Do protez całkowitych/ częściowych

- VITAPAN CUSPIFORM Posterior w kombinacji z VITAPAN Anterior
- patrz tabela porównawcza kombinacji z VITAPAN PLUS Anterior

VITAPAN® CUSPIFORM



> ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN CUSPIFORM karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN CUSPIFORM Posterior



VITAPAN CUSPIFORM magazyn zębów

- X-Small*: 50 garniturów/400 Posterior
- Small*: 100 garniturów/800 Posterior
- Medium*: 200 garniturów/1.600 Posterior
- Large*: 300 garniturów/2.400 Posterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®, **

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

> KOMPONENTY SYSTEMOWE





UNIVERSAL
PROSTHETIC



płaski relief
powierzchni
żującej

znakomita
odporność

Pewna funkcjonalność w protetyce wieku podeszłego dzięki płaskoguzkowej powierzchni żującej.



> FACTS & FEATURES

Co? • delikatne zęby boczne o płaskim reliefie powierzchni żującej wykonane z kompozytu MRP

Korzyści? • **łatwa rekonstrukcja funkcji żucia u pacjentów w podeszłym wieku**,
dzięki płaskiej powierzchni żującej oraz z uwzględnieniem swobody ruchu języka
• **znakomita odporność na obciążenia**
i stabilność pod względem abrazji
• **bardzo dobre możliwości szlifowania i polerowania**,
dzięki znakomitej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów

W jakim celu? • najlepsze rozwiązania dla protetyki wieku podeszłego

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- wąskie, delikatne kształty zębów bez ograniczeń dla języka
- płaskie, zredukowane powierzchnie żujące/relief guzków z uwzględnieniem swobody języka

szczegółne cechy charakterystyczne

- szczęka-nachylenie guzków: około $> 6^\circ$
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg stref barwnych

Zalecane zastosowanie?

Najlepsze rozwiązania protetyczne:

- protezy wieku podeszłego

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC

Dostępne kolory?

- 15 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 5 x kształty zębów bocznych – szczęka
- 5 x kształty zębów bocznych – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

Posterior					
10S	11S	12S	13S	14S	
7,5	7,8	8,7	8,3	9,3	
					
					
6,8	7,3	7,9	7,4	8,3	

VITAPAN SYNOFORM®

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Protetyka wieku podeszłego

- VITAPAN SYNOFORM Posterior w kombinacji z VITAPAN Anterior
- patrz tabela porównawcza kombinacji z VITAPAN PLUS Anterior



> ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITAPAN SYNOFORM karta kształtów

Metalowa szkatuła z wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITAPAN SYNOFORM Posterior



VITAPAN SYNOFORM magazyn zębów


- X-Small*: 50 garniturów/400 Posterior
- Small*: 100 garniturów/800 Posterior
- Medium*: 200 garniturów/1.600 Posterior
- Large*: 300 garniturów/2.400 Posterior

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4***

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

> KOMPONENTY SYSTEMOWE

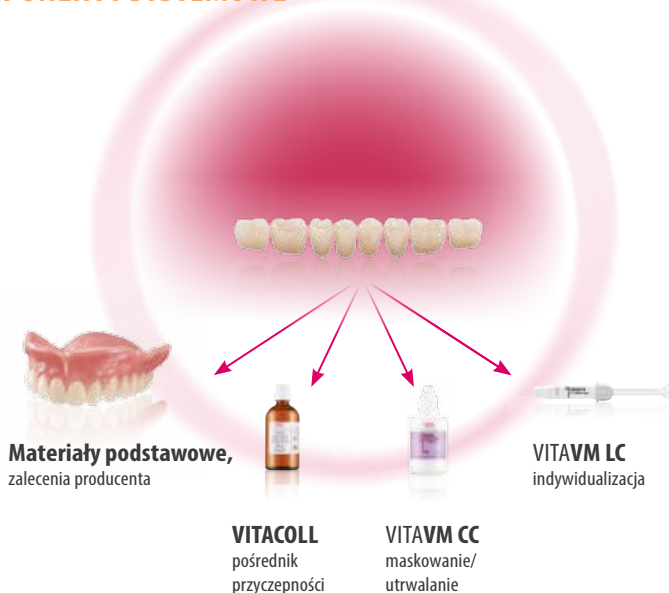




 **SOLIDNA PROTETYKA STANDARDOWA W DOGODNYCH CENACH.**

Solidna protetyka standardowa w dogodnych cenach?


VITA BASIC PROTHETIK oferuje zęby polimerowe HC w celu tworzenia standardowych protez całkowitych i częściowych w dogodnych cenach.

› PRZEGLĄD ZĘBÓW KONFEKCYJNYCH

Zalecane kombinacje zębów Anterior-/Posterior

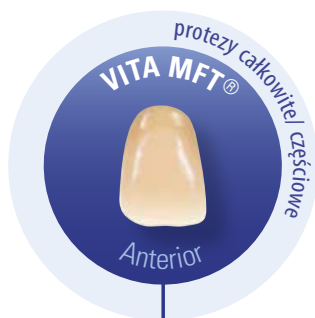

Solidna protetyka
standardowa
w dogodnych cenach.

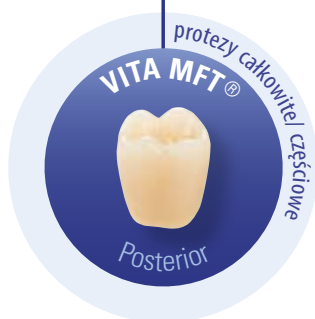

Do wszystkich koncepcji
protetycznych dzięki
wielofunkcyjnym
powierzchniom żującym.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM

dalsze dane dotyczące produktu ›




BASIC
PROSTHETIC



wielostronna
geometria zębów

naturalne
oddziaływanie
koloru

Solidna protetyka standardowa w dogodnych cenach.

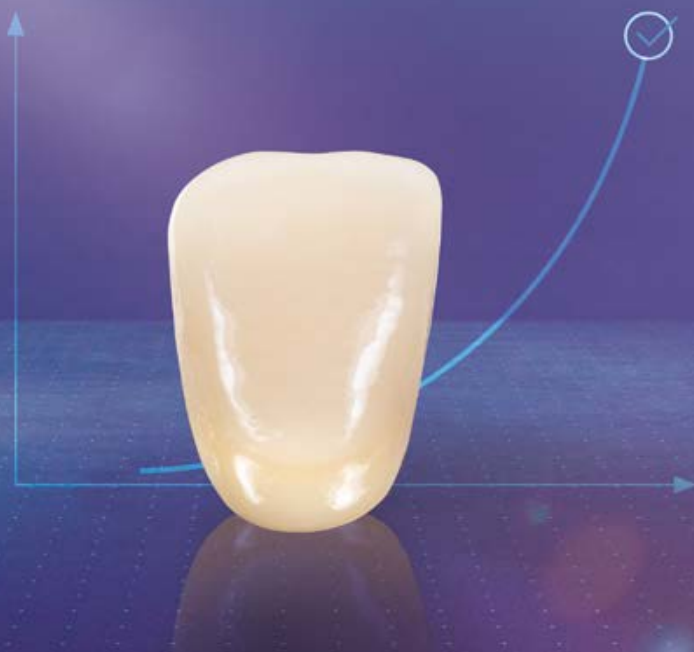

> FACTS & FEATURES

- Co?** • Zęby przednie Basic do standardowej protetyki z materiału polimerowego HC
- Korzyści?**
- **prosta rekonstrukcja harmonijnego uśmiechu**
dzięki wielostronnemu zastosowaniu zębów o uniwersalnych kształtach
 - **naturalne oddziaływanie koloru,**
dzięki zintegrowanemu przebiegowi koloru w 3D, teksturze powierzchni i dobrej transmisji światła
 - **dobre możliwości obróbki**
dzięki dobrej homogeniczności materiału oraz stabilności brzegów
- W jakim celu?** • do solidnych uzupełnień standardowych takich jak protezy całkowite/częściowe

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- uniwersalny kształt i kontur zęba w celu uzyskania naturalnego wyglądu
- płaska, naturalnie abrazyjna charakterystyka powierzchni siecznej

szczególne cechy charakterystyczne

- wydatny obszar szkliwa dla dobrej transmisji światła
- tekstura powierzchni pełna niuansów w celu stoworzenia żywej gry światła
- struktura warstw w 3D to naturalny przebieg stref barwnych

Zalecane zastosowanie?

- solidne rozwiązania standardowe do wykonywania protez całkowitych/częściowych

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC

Dostępne kolory?

- 13 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 4 x VITA classical A1–D4® kolory
A1–D4 (prócz B1)

Dostępne kształty/garnitury?

- 12 x kształty zębów przednich – szczeka (podział na cztery grupy kształtów)
- 5 x kształty zębów przednich – żuchwa



> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

szczeka-Anterior						
 kształt łopaty	O40  10,0 7,5	O44  10,2 8,1	O49  11,8 9,0			
	T41  9,4 7,5	T43  10,3 8,2	T46  10,2 8,5	T49  11,8 9,0		
	R42  9,3 7,9	R45  10,3 8,2	R47  11,0 8,5			
	S47  10,8 8,9	S50  12,0 9,2				
 kształt trójkąta						
 kształt prostokątny						
 kształt kwadratowy						
żuchwa-Anterior						
	L33  9,0 4,8	L34  8,6 5,1	L37  9,8 5,5	L37LN*  9,8 5,5	L40  10,5 6,1	

*) L37 kształt zęba z dłuższą szyjką

› ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

solidne rozwiązania standardowe do wykonywania protez całkowitych i częściowych

- VITA MFT Anterior w połączeniu z VITA MFT Posterior

VITA MFT Anterior		VITA MFT Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
O40 40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44 43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49 49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

T41 40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43 43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46 46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49 48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

R42 42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45 44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47 46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6

VITA MFT Anterior		VITA MFT Posterior	
szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm	szczeka/nr.  mm	żuchwa/nr.  mm
S47 46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50 49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITA MFT karta kształtów

Kompaktowa kaseta ze wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITA MFT Anterior



VITA MFT magazyn zębów

25-magazyn:


- 72 garniturów/432 Anterior*
- 48 garniturów/384 Posterior*

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy pomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE

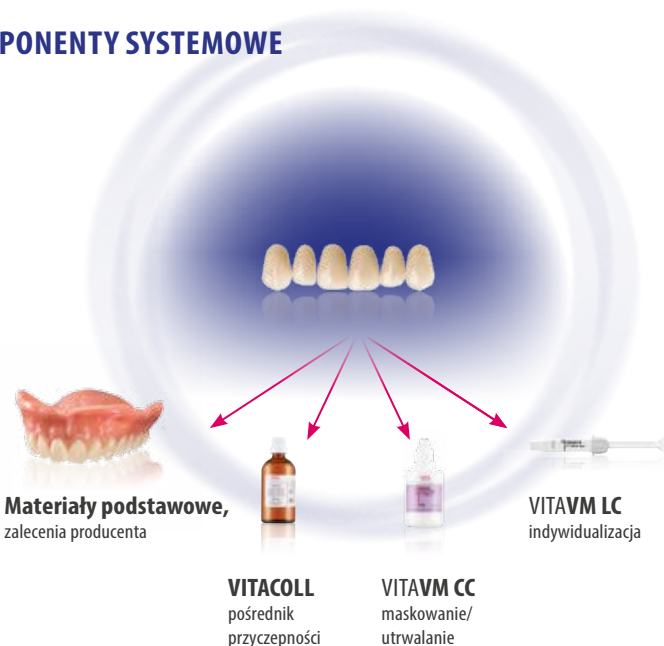



BASIC
PROSTHETIC



wielofunkcyjna
powierzchnia
żująca

dokładnie
zdefiniowane
zwarcie centryczne

Do wszystkich koncepcji protetycznych dzięki wielofunkcyjnym powierzchniom żującym.



> FACTS & FEATURES

- Co?**
- zęby boczne Basic z polimeru HC posiadają wielofunkcyjną powierzchnię żującą
- Korzyści?**
- **proste ustawianie**
dzięki kształtowi powierzchni żującej stworzonej wg zasady przekładni zębatej
 - **uniwersalne i niezawodne, znajdujące zastosowanie we wszystkich koncepcjach**
protetycznych dzięki wielofunkcyjnemu kształtowi powierzchni żujących
 - **oszczędność czasu w trakcie ustawiania zębów**
bez dodatkowego szlifowania, dzięki dokładnie zdefiniowanemu zwarcu centrycznemu
- W jakim celu?**
- do solidnych uzupełnień standardowych takich jak protezy całkowite/częściowe

> PODSTAWOWE INFORMACJE



Charakterystyka?

Projekcja kształtu

- uniwersalny kształt zębów posiadający językowo-policzkową szerokość zbliżoną do kształtu zębów naturalnych
- wielofunkcyjna powierzchnia żującą posiada zdefiniowane kontakty zgryzu centrycznego

szczególne cechy charakterystyczne

- szczęka-nachylenie guzków: około 15° do 20°

Zalecane zastosowanie?

- solidne rozwiązania standardowe do wykonywania protez całkowitych/częściowych

Protetyka-/koncepcja ustawiania zębów?

Stosujemy do wszystkich powszechnych koncepcji okluzji językowej i wybalansowanej:

np. wg Gysi, prof. dr. Gerber, wg APF/TiF, wg ABC



W szczególności stosujemy do:
językowych koncepcji okluzyjnych

Dostępne kolory?

- 13 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® kolory
0M1, 0M3, 1M1–5M1
- 4 x VITA classical A1–D4® kolory
A1, A3, C3, D3

Dostępne kształty/garnitury?

- 3 x kształty zębów bocznych – szczęka
- 3 x kształty zębów bocznych – żuchwa



POSTERIOR

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM

[dalsze dane dotyczące produktu >](#)

> KSZTAŁTY - PRZEGLĄD

Posterior			
PU29 – PL29	PU31 – PL31	PU33 – PL33	
 9,0	 9,6	 10,3	
 9,5	 10,0	 10,6	

> ZALECANE KOMBINACJE

Kombinacje wg zakresu zastosowania:

Do solidnych rozwiązań standardowych

- VITA MFT Anterior w połączeniu z VITA MFT Posterior
- tabela porównawcza kombinacji z VITA MFT Anterior

ASORTYMENT I MAGAZYNOWANIE



VITA MFT karta kształtów

Kompaktowa kaseta ze wszystkimi kształtami w celu doboru zębów:

- VITA MFT Posterior



VITA MFT magazyn zębów

25-magazyn:

- 72 garniturów/432 Anterior*
- 48 garniturów/384 Posterior*

Dostępne w kolorach VITA classical A1–D4®
i VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Wskazówka: w zestawie zębów konfekcyjnych otrzymają Państwo najczęściej używane kształty i kolory. Chętnie możemy dopomóc w indywidualnej specyfikacji i doborze zębów konfekcyjnych.

**) porównanie dostępnych kolorów

KOMPONENTY SYSTEMOWE



Materiały podstawowe,
zalecenia producenta



VITACOLL
pośrednik
przyczepności



VITAVM CC
maskowanie/
utrwalanie



VITAVM LC
indywidualizacja

Komponenty systemowe/osprzęt

> NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA KONWENCJONALNEGO WYKONAWSTWA PROTEZY

Wycisk/
wykonanie modeli



- W celu wykonania wycisków sytuacyjnych/indywidualnych stosować właściwe łyżki (np. VITA) i odpowiednie materiały wyciskowe.

Ustalanie
koloru *



- W celu wyznaczenia koloru w uzębieniu resztkowym stosujemy urządzenie **VITA Easyshade V** lub kolornik VITA.

Analiza modeli/
wybór kształtu



- Po analizie modeli w celu doboru kształtów zębów konfekcyjnych VITA stosować kartę kształtów zębów VITA.

Ustawienie
zębów w wosku



- W celu ustawienia zębów oraz stworzenia symulacji żucia używać właściwych wosków i narzędzi.

Zastosowanie
pośrednika
przyczepności



- W celu stworzenia pewnego spojenia zębów konfekcyjnych VITA z materiałem płyty protezy używać pośrednika przyczepności **VITACOLL**.

Wykonanie
płyty protezy



- W celu wykonania płyty protezy stosować zalecane przez firmę VITA materiały do polimeryzacji na zimno/ciepło metodą np. wtryskową lub upychając akryl w puszcze polimeryzacyjnej.

Ukończenie
pracy



- Do wykończenia i obróbki protezy stosujemy odpowiednie instrumenty polerskie, a do indywidualizacji kompozyt licujący **VITA VM LC**.

*) Wizualne lub pomiarowo-techniczne wyznaczenie koloru przeprowadzamy tylko na naturalnym uzębieniu pacjenta.

> KOMPONENTY SYSTEMOWE VITA PROTHETIK ROZWIĄZANIA



Materiał do podstawy

Zalecane polimery na ciepło/zimno do wykonywania płyty protezy: ProBase (Ivoclar Vivadent), PalaXpress (Heraeus Kulzer) i FuturaGen (Schütz Dental).



VITACOLL®

W celu stworzenia pewnego spojenia zębów konfekcyjnych VITA z materiałem płyty protezy używać pośrednika przyczepności. Zalecane w przypadku polimerów na ciepło, a w przypadku autopolimerów/na zimno stosować obowiązkowo.



VITAFOL®H

Silikonowy materiał izolacyjny stosujemy w celu ochrony zębów konfekcyjnych VITA w czasie uwalniania z puszk. W ten sposób chronimy przestrzeń międzyzębowe przed zanieczyszczeniami, a modelacja dziąsła pozostaje w nienaruszonym stanie.



VITAVM®LC

Kompozyt licujący służy do indywidualizowania zębów konfekcyjnych VITA i gwarantuje estetyczne wyniki. Dostępny w dwóch konsystencjach: w paście i o niskiej lepkości (wariant flow).



VITAVM®CC

Polimer do polimeryzacji na zimno nie zawiera wypełniacza, przeznaczony do napraw, do maskowania zasuw w pracach kombinowanych i do mocowania zębów konfekcyjnych VITA w protezach szkieletowych.

Chętnie udzielamy dalszej pomocy

› Dalsze informacje dotyczące naszych produktów i ich obróbki znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com



Dystrybucja w Polsce:
Denon Dental Sp. z o.o.
Tel. +48 22 717 58 70
od godz. 9.00 do 17.00



Kontakt e-mailowy

▶ Na adres info@dental.pl mogą Państwo kierować wszystkie pytania i życzenia!



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM


VITA
MFT

ZĘBY
CAD/CAM

MATERIAŁY
CAD/CAM

KOMPONENTY
CAD/CAM

Dalsze informacje dotyczące **VITA PROTHETIK LÖSUNGEN** (rozwiązania)
znajdą Państwo na stronie internetowej: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

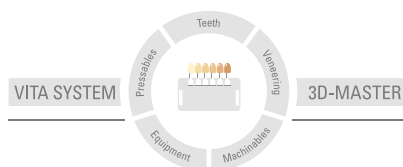

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu w celu kontroli przewidzianego zastosowania. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten będzie stosowany z niezgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych producentów. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww. zestawu.

Wydanie broszury informacyjnej: 02.18

Powyższe wydanie instrukcji obróbki materiału dezaktualizuje dotychczasowe wydania. Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia **CE** 0124:

VITAPAN® rodzina produktów, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA MFT®**,
VITA VIONIC® rodzina produktów, **VITACOLL®**, **VITAFOL® H**,
VITAVM® LC i **VITAVM® CC**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik