

Oprogramowanie 3Shape Dental System

Rób więcej tego, co kochasz



3shape 

Szanowni Państwo!

Badania pokazują, że coraz więcej dentystów korzysta z zalet, takich jak przewidywalność, wydajność oraz większe korzyści dla pacjentów, które wiążą się ze stosowaniem skanerów wewnątrzustnych i oprogramowania do diagnostyki i leczenia. Państwa laboratorium odgrywa dużą rolę we wspieraniu tej zmiany. Dentysta korzystający z rozwiązań cyfrowych potrzebuje silnych partnerów.

Oprogramowanie 3Shape Dental System to idealne rozwiązanie, które pomoże uwolnić kreatywność i być silnym partnerem w cyfrowym świecie. Najnowsza wersja naszego systemu — Dental System 2020 — zapewnia wydajne procedury pozwalające świadczyć najbardziej poszukiwane usługi, takie jak wykonywanie protez, przezroczystych szyn korekcyjnych, szyn i innych elementów. W ubiegłym roku do naszego portfolio skanerów dodaliśmy również nasz najszybszy skaner E4 łączący wszystkie zalety naszych skanerów i w pełni zintegrowany z naszym oprogramowaniem do projektowania, aby zapewnić szybkość działania, szerokie możliwości i swobodę wykonywania pracy.

Michael Jordan powiedział kiedyś: „talent wygrywa mecze, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa”. Dzięki systemowi 3Shape Dental System masz do dyspozycji niezrównany ekosystem rozwiązań, technologii i partnerów do wyboru.

Stomatologia się zmienia.
Przyczyną zmian są laboratoria.
Zmieńmy razem oblicze stomatologii.

Tais Clausen,
Współzałożyciel firmy 3Shape

Rune Fisker,
Starszy wiceprezes ds. Strategii Produktów



Nowości od firmy 3Shape

SKANER E4 — najszybszy z naszych skanerów laboratoryjnych dotąd wprowadzonych na rynek

Zyskaj więcej czasu, aby móc wykorzystać swoje zdolności w zakresie projektowania. Nasz skaner 3Shape E4 z 4 kamerami 5 MP zapewnia niespotykaną prędkość skanowania. Posiada on również funkcję skanowania filaru w modelu w celu uzyskania wysokiej wydajności, a także wyjątkowo wysoką dokładność nawet w bardzo wymagających przypadkach. Czas skanowania pełnego łuku — 9 sekund



Zacznij korzystać z technologii cyfrowych protez

3Shape oferuje wiodące oprogramowanie do projektowania protez. Intuicyjne oprogramowanie sprawia, że produkcja protez jest bardziej wydajna dzięki prostemu przepływowi prac projektowych i obsłudze najnowszych opcji produkcji.



Aby rozwijać swój biznes, postaw na przezroczyste aparaty ortodontyczne

Rozpocznij produkcję prostych przezroczystych aparatów ortodontycznych, korzystając z oprogramowania 3Shape Clear Aligner Studio. Dostępne w tym oprogramowaniu kierowane procedury ułatwiają generowanie konfiguracji i produkcję elementów aparatów ortodontycznych z użyciem drukowanych modeli i aparatu do kształtowania podciśnieniowego.

Zdecyduj się na **wymianę na droższy** skaner laboratoryjny opracowany w najnowszej technologii

Skorzystaj z oferowanego przez 3Shape programu wymiany na droższe rozwiązanie i zacznij skanować pełne łuki w zaledwie dziewięć sekund za pomocą E4! 3Shape oferuje atrakcyjne programy wymiany starego skanera 3Shape na najnowszą technologię. Oferujemy również program przyjmowania innych skanerów w rozliczeniu, co ułatwia rozpoczęcie korzystania z systemu 3Shape Dental System.


Wymień swój stary skaner i otrzymaj specjalny rabat na nowy

Jeśli masz starszy skaner 3Shape, możesz kwalifikować się do naszego specjalnego promocyjnego rabatu na wymianę na droższy model. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Uaktualnij posiadane rozwiązanie do pakietu 3Shape Dental System Complete Restorative

W przypadku wymiany posiadanego skanera na droższy model możesz także rozpocząć projektowanie wszystkich opracowań, korzystając z wymiany oprogramowania 3Shape Dental System Premium na droższe rozwiązanie Complete Restorative. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zachowaj posiadane oprogramowanie 3Shape Dental System, ale uaktualnij skaner i komputer

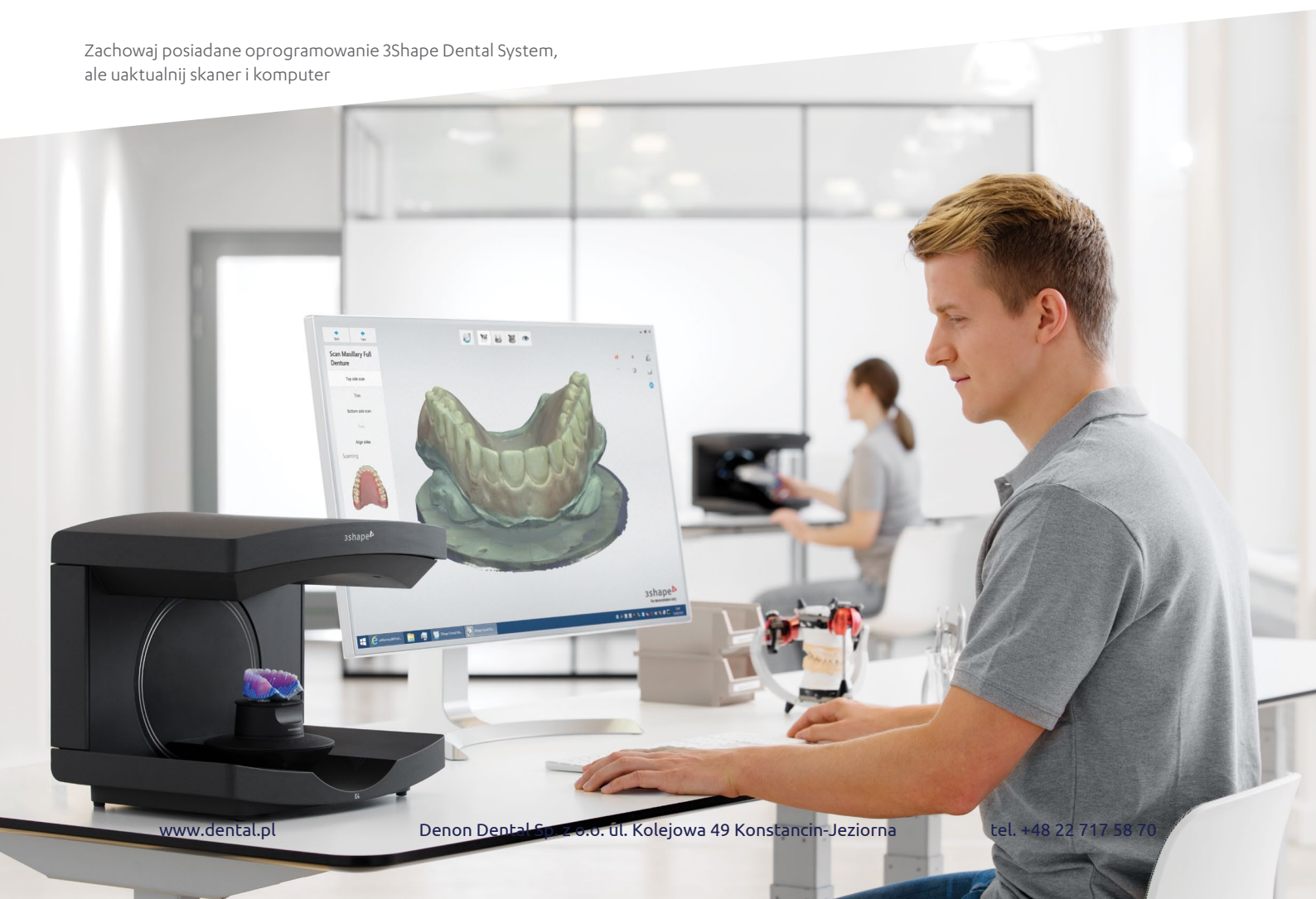

Wykonuj więcej zleceń, szybciej i dokładniej dzięki skanerowi E4

Skaner laboratoryjny E4 to najszybszy i najdokładniejszy skaner, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Skanuje pełny łuk w zaledwie dziewięć sekund. Dzięki 4 kamerom 5 MP zapewniającym wysoce dokładne, zaawansowane skanowanie wycisków oraz filarów znajdujących się jeszcze w modelu, skaner E4 zmniejszy liczbę etapów skanowania, zaoszczędzi czas i pozwoli Ci pracować wydajniej.

Podwojona **szybkość**

Czas skanowania pełnego łuku — 9 sekund

Podwojona **dokładność**

Dokładność przy 4 mikronach.

Podwojenie liczby kamer

Cztery kamery 5 MP umożliwiają skanowanie filarów w modelu z pominięciem dodatkowych kroków wymaganych do skanowania filarów pojedynczo.

Wysoka precyzja skanowania wycisków

Możliwa dzięki czterem kamerom 5 MP skanera.



„Muszę powiedzieć, że w skaner E4 naprawdę warto zainwestować! Oszczędza nam on dużo czasu — zwłaszcza funkcja kopiowania protezy, dzięki której skanowanie obu szczęk zajmuje mniej niż 4 minuty”.

Germen Versteeg

Właściciel, DTL Mediaan

Skannery laboratoryjne firmy 3Shape na miarę wszystkich potrzeb

E1 Podstawowe funkcje skanowania na potrzeby laboratoriów cyfrowych



Kamera:	2 x 5 MP
Dokładność (ISO 12836):	10 µm
Prędkość skanowania (pełen łuk):	40 s
Prędkość skanowania (wycisk pełnego łuku):	130 s
Tekstura:	N/D
Strategia skanowania:	Standardowe

E2 Zwiększenie wydajności oraz funkcja skanowania tekstury



Kamera:	2 x 5 MP
Dokładność (ISO 12836):	10 µm
Prędkość skanowania (pełen łuk):	30 s
Prędkość skanowania (wycisk pełnego łuku):	90 s
Tekstura:	Czarno-biała
Strategia skanowania:	Standardowa

E3 Wyjątkowa wydajność i dokładność umożliwiające projektowanie belki na implantach



Kamera:	2 x 5 MP
Dokładność (ISO 12836):	7 µm
Prędkość skanowania (pełen łuk):	22 s
Prędkość skanowania (wycisk pełnego łuku):	80 s
Tekstura:	Kolor
Strategia skanowania:	Standardowe

Procedura skanowania wycisków oraz gipsowych filarów — korzystaj z zalet obydwu metod

Czy chcesz zachować kontrolę, odstawiając krawędź preparacji gipsowego filaru, a przy tym uniknąć odlewania i cięcia na sekcje całego modelu? Połącz skany wycisku ze skanami poszczególnych filarów gipsowych pobranych z tego samego wycisku, tworząc pojedynczy przypadek. Umożliwia to znacznie szybsze sprawdzenie szczegółów w konkretnych obszarach.



E4

Bardzo duża prędkość i dokładność



Kamera:	4 x 5 MP
Dokładność (ISO 12836):	4 µm
Prędkość skanowania (pełen łuk):	9 s
Prędkość skanowania (wycisk pełnego łuku):	45 s
Tekstura:	Kolor
Strategia skanowania:	Filar w modelu

D2000

Skanowanie typu „wszystko w jednym” zapewnia maksymalny wzrost wydajności pracy



Kamera:	4 x 5 MP
Dokładność (ISO 12836):	5 µm
Prędkość skanowania (pełen łuk):	16 s
Prędkość skanowania (wycisk pełnego łuku):	60 s
Tekstura:	Kolor
Strategia skanowania:	Filar w modelu oraz „wszystko w jednym”



„Najnowsza wersja systemu 3Shape Dental System zapewnia ogromną poprawę dokładności dzięki skanowaniu filaru w wycisku. Przeskanowaliśmy tysiące wycisków silikonowych z użyciem rozwiązań firmy 3Shape, co pozwala nam pominąć etap modelowania i przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy naszych klientów”.

BJ Kowalski
ROE Dental Laboratory

Wykonuj protezy cyfrowo i zwiększaj produktywność

Zaawansowane udoskonalenia oprogramowania 3Shape Denture Design oraz nowe możliwości w zakresie produkcji i materiałów czynią to rozwiązanie bardzo atrakcyjnym dla laboratoriów, które już dzisiaj chcą zacząć wytwarzać protezy w technologii cyfrowej. Cyfrowe procedury zmniejszają koszty produkcji i zwiększają wydajność.

NOWOŚĆ: udoskonalony projekt dziąsła

Projektowanie anatomicznie realistycznych dziąseł stało się jeszcze szybsze i prostsze. Użyj wstępnie zdefiniowanych wartości lub dostosuj ustawienia, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd.

NOWOŚĆ: procedura kopiowania protezy

Skanuj istniejące protezy i projektuj nowe w kilku prostych krokach. Oprogramowanie automatycznie generuje zęby na podstawie istniejących protez. Nowe protezy mogą być produkowane jako pojedynczy monoblok lub oddzielnie jako płyta i zęby.



Monolityczna proteza Ivotion Zdjęcie dzięki uprzejmości Erica Kukucka, technika dentystycznego z Kanady

NOWOŚĆ: krążek Ivotion firmy Ivoclar Vivadent

Wykonaj pełną protezę w jednym nieprzerwanym procesie frezowania, używając innowacyjnego krążka Ivotion firmy Ivoclar.

Krążek Ivotion wykorzystuje unikalną trójwymiarową geometrię zęba i łuku zębowego. Ivotion łączy zęby i materiał płyty w jednym dwukolorowym krążku, aby zapewnić wydajne rozwiązanie do cyfrowego wykonania protez monolitycznych.

NOWOŚĆ: Opatentowana procedura Ivoclar Vivadent dla użytkowników rozwiązań 3Shape

System Ivotion Denture firmy Ivoclar Vivadent zostanie zintegrowany i włączony do systemu 3Shape Dental System 2020.

Procedura obejmuje etapy leczenia dentystycznego, proste i kierowane etapy projektowania, biblioteki zębów oraz automatyczny proces usuwania nadmiaru krążka poprzez frezowanie.

Procedura jest dostępna dla osobnych materiałów zębów i płyty protezy, a także dla procesu frezowania monolitycznego z nowym krążkiem Ivotion.



„Przejsście na technologię cyfrową było najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Liczba korekt u pacjentów spadła o ponad 80%”.

Esther Schwenning

Techniczka dentystyczna, Kolumbia Brytyjska, Kanada



Frez

Frezowanie w celu wykonywania protez o wysokiej estetyce

Frezowanie zapewnia wysoką jakość przy użyciu sprawdzonych i estetycznych materiałów. Rozwiązanie 3Shape można zintegrować z szeroką gamą frezarek, przy czym cały czas dodawane są kolejne urządzenia.



Druk 3D

Oszczędność kosztów dzięki drukowaniu 3D

Druk 3D umożliwia zapewnienie funkcjonalnej protezy przy niższych kosztach. Drukarki 3D i materiały do druku ewoluują w szybkim tempie i stale poprawiają trwałość oraz estetykę. Oprogramowanie firmy 3Shape do protez jest zoptymalizowane pod kątem drukowania 3D, co może zrewolucjonizować rynek protez.



Prefabrykowane zęby

Jeśli wolisz korzystać z prefabrykowanych zębów, możesz wybierać z pokazanej poniżej szerokiej gamy bibliotek zębów w protezie. Wykonaj płyty protez poprzez frezowanie albo metodą wydruku 3D, a następnie wklej prefabrykowane zęby.

Dostęp do głównych dostawców zębów

Oprogramowanie Dental System posiada najważniejsze biblioteki zębów do protez, co pozwala wybrać preferowanego producenta. Stale dodajemy kolejne biblioteki, aby zapewnić najbardziej wszechstronne rozwiązanie do protez dentystycznych.



KULZER
WITIBU CHEMICALS GROUP



Candulor

VITA

Vertex Dental

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ


NOBILIUM
Your Partner In Prosthetic Dentistry

Zobacz, co nowego w oprogramowaniu 3Shape Dental System 2020

Oprogramowanie 3Shape Dental System 2020 pozwala robić więcej tego, co kochasz, inteligentniej i szybciej dzięki ulepszonym procedurom, które pozwalają zwiększyć wydajność i osiągnąć stabilność większą niż kiedykolwiek.

NOWOŚĆ: Wykonywanie wysoce estetycznych mostów na implantach stało się łatwiejsze dzięki ograniczeniu procedury wykonywania mostu

Projektuj wysoce estetyczne i funkcjonalne pełne mosty anatomiczne łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej dzięki naszej nowej zintegrowanej procedurze tworzenia mostu na implantach. Elastyczne przesuwanie i projektowanie tulei już po kilku kliknięciach. Możesz wybrać dowolną opcję pomniejszania lub zostawić pełną koronę anatomiczną. Ostateczny kształt korony można również wykorzystać do tworzenia optymalnych, anatomicznie poprawnych uzupełnień, a także pasów językowych i licowań po stronie wargowej.

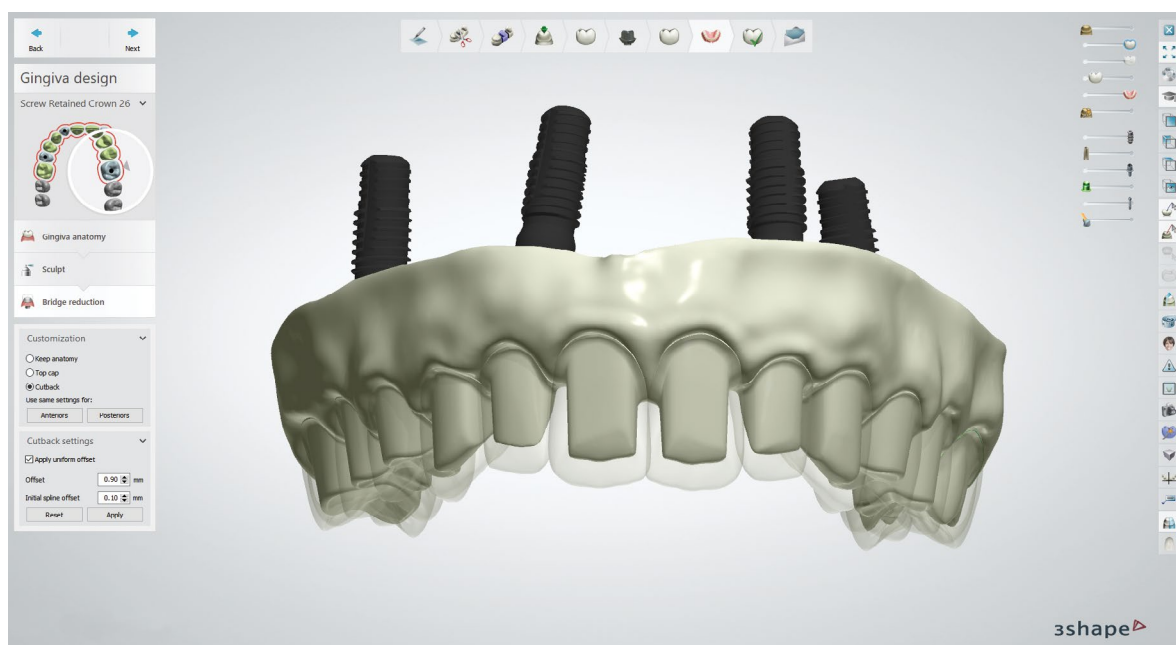

NOWOŚĆ: Bezpośredni dostęp do samouczków Akademii 3Shape

Jednym kliknięciem uzyskaj bezpośredni dostęp do ponad 130 samouczków Akademii 3Shape w oprogramowaniu Dental System, dzięki którym wzrosną Twoje umiejętności projektowania.

NOWOŚĆ: Prostsze zarządzanie materiałami

Nowy filtr umożliwia łatwe przeglądanie materiałów w formularzu zamówienia. Umieść swoje ulubione materiały na górze listy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp.

Większa elastyczność dzięki dodatkowym skanom

NOWOŚĆ: Zapisywanie połączonych modeli i projektów

Połącz wszystkie wybrane modele w jeden i zachowaj połączony projekt do przyszłego użytku. Jakikolwiek dodane informacje są zapisywane w skanie rozszerzonym.

NOWOŚĆ: Przekształcaj projekty w dodatkowe skany

Przekształcaj projekty w dodatkowe skany, korzystając z nowego narzędzia Smile Composer®. Nie musisz polegać na jednym przygotowaniu wstępnym, możesz przesłać wax-up, poprzedni projekt lub makietę do powtórzenia podczas modelowania.



Zwiększ wydajność dzięki integracji z systemem zarządzania laboratorium

NOWOŚĆ: Nie musisz już wypełniać informacji o przypadku zarówno w formularzach systemu Dental System, jak i systemu zarządzania laboratorium. Oprogramowanie 3Shape Dental System 2020 jest teraz zintegrowane z czterema głównymi systemami zarządzania laboratorium i automatycznie przesyła informacje o przypadkach, aby zaoszczędzić czas!

Synchronizuj informacje o przypadku i statusie


System 3Shape Dental System automatycznie synchronizuje informacje o przypadku i statusie z systemem zarządzania laboratorium. Nie musisz więc dwa razy wprowadzać informacji, a systemu zarządzania laboratorium możesz używać jako podstawowego narzędzia planowania.

Integracja z rozwiązaniami globalnych dostawców systemów zarządzania laboratorium

Oprogramowanie 3Shape Dental System jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniami dostawców systemów zarządzania laboratorium: Jenmar, Labtrac, MagicTouch oraz VeviDental.

Wyłącznie system 3Shape Dental System

System 3Shape Dental System to jedyne oprogramowanie laboratoryjne na rynku, które zapewnia integrację z rozwiązaniami głównych dostawców systemów zarządzania laboratorium.

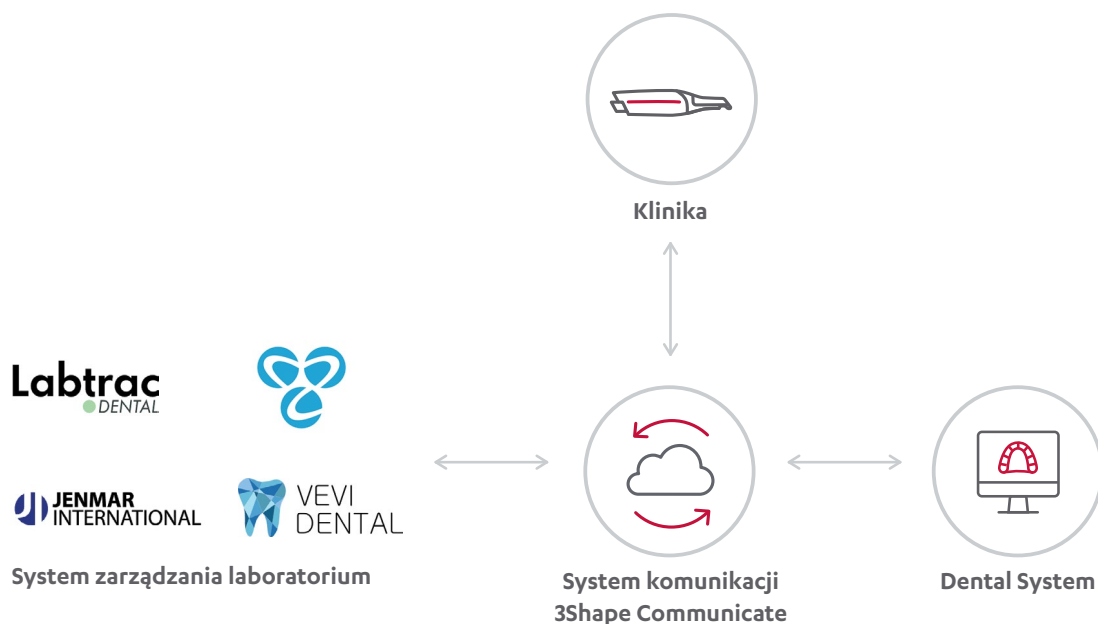

Utwórz zamówienie w systemie zarządzania laboratorium i zsynchronizuj je bezpośrednio z systemem Dental System za pośrednictwem systemu Communicate. Skany 3Shape TRIOS® od dentysty trafiają zarówno do systemu Dental System, jak i systemu zarządzania laboratorium.

Uzyskaj pomoc, kiedy jej potrzebujesz od dostawców usług projektowania

Skorzystaj z usług projektowania, aby uzyskać dodatkową pomoc, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Dzięki usługom projektowania możesz również rozszerzyć zakres usług świadczonych przez Twoje laboratorium i rozwinąć działalność.



Korzystaj w okresach największego obciążenia

Uzyskaj pomoc w okresach szczytowego obciążenia, w razie nagłych wypadków lub nieobecności — lub gdy po prostu musisz wyjść wcześniej.



Nowe opracowania

Dzięki systemowi Dental System masz połączenie z dostawcami usług projektowania, dzięki czemu możesz rozszerzyć ofertę opracowań dla klientów.



Połączenie przez ekosystem rozwiązań 3Shape

Od koron i mostów po implanty, protezy zdejmowane i ortodoncję — łącz się z partnerami świadczącymi usługi projektowania bezpośrednio za pomocą 3Shape Communicate®. Twórz projekty we własnym zakresie lub we współpracy z partnerami.

Współpracuj z FullContour — partnerem 3Shape w zakresie usług projektowania



FULLCONTOUR
DESIGN SERVICES

Bezproblemowa integracja

System FullContour jest bezproblemowo zintegrowany z systemem 3Shape Dental System. Możesz uzyskać dostęp do platformy projektowej FullContour za pomocą jednego kliknięcia w Dental System. FullContour jest pierwszym partnerem Projektowym 3Shape oferującym projekty wszystkich opracowań klientom w USA i Europie w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę fullcontour.com.

Rozszerzona rzeczywistość z IvoSmile

Oprogramowanie 3Shape Dental System 2020 zostanie zintegrowane z aplikacją rozszerzonej rzeczywistości IvoSmile® firmy Ivoclar Vivadent. Integracja umożliwi laboratorium odbieranie obrazów twarzy pacjenta, w tym proponowanego leczenia estetycznego, bezpośrednio z aplikacji do systemu Dental System. Następnie można zaprojektować uzupełnienie na podstawie rzeczywistych obrazów pacjenta i odesłać projekt z powrotem do aplikacji IvoSmile w celu sprawdzenia przez lekarza i pacjenta.

Fabulous Smiles — uśmiechy jak z albumu

Znani na całym świecie technicy Przemek Seweryniak i Kate Brantvik stworzyli wyjątkową platformę do projektowania uśmiechu, której początek dała ich książka „Fabulous Smiles”. Społeczność stomatologów przyjęła nową, innowacyjną platformę, która wykorzystuje zarówno książkę, jak i oprogramowanie 3Shape Dental System. Procedura pracy przy tworzeniu pięknych uśmiechów umożliwia współpracę laboratoriów, lekarzy i pacjentów. Dental System to jedyne oprogramowanie na rynku zintegrowane z tą platformą.



Odkryj więcej: www.fabsmilesbook.com

www.dental.pl

Denon Dental Sp. z o.o. ul. Kolejowa 49 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 22 717 58 70

1. Zachwyčaj swoich pacjentów
Używaj aplikacji IvoSmile® do
wizualizacji przebiegu leczenia



2. Wyślij propozycję leczenia do laboratorium
Udostępnij projekt i zdjęcia pacjentów



**3Shape
Communicate**

3. Projektuj w Dental System
Projektuj końcowe rezultaty leczenia
w oparciu o przypadek w IvoSmile®




4. Wyślij ostateczny projekt do zatwierdzenia
Wyślij sfinalizowany projekt z powrotem
do aplikacji IvoSmile®



Procedura pracy z albumem Fabulous Smiles




1. Wybierz uśmiech
z albumu „Fabulous Smiles”

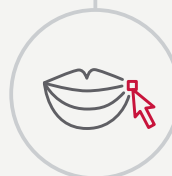

2. Zaprojektuj uśmiech,
używając biblioteki
z wybranego uśmiechu




3. Wyślij projekt uśmiechu
do laboratorium celem wykonania
dokładnej repliki fizycznej

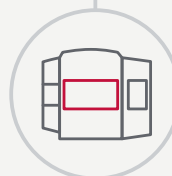

4. Wykonaj projekt CAD i wyprodukuj,
korzystając z odpowiedniej biblioteki
kontroli uzębienia w uśmiechu 3D
w Dental System (po zeskanowaniu
w TRIOS®)

Bądź dla dentystów partnerem nr 1 w dziedzinie implantów

Zapewnij usługi implantologiczne i uzyskuj zlecenia na odbudowy! Zwiększ produktywność systemu 3Shape Dental System dzięki oprogramowaniu 3Shape Implant Studio®, aby łatwo projektować i produkować szablony chirurgiczne oraz rozszerzyć ofertę swojego laboratorium o usługę planowania leczenia implantologicznego. Dzięki 3Shape Implant Studio jesteś preferowanym partnerem dentystów w zakresie usług implantologicznych.

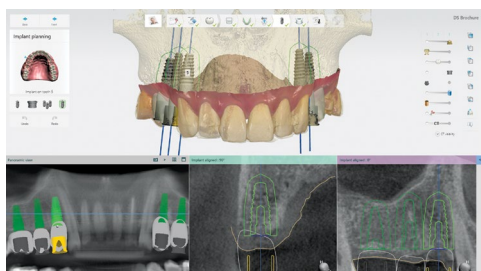

Dostarczaj usługi planowania implantów oraz szablony chirurgiczne dzięki Implant Studio

Planowanie pozycji implantów dla pacjentów z brakiem jednego zęba lub całkowicie bezzębnych w oparciu o wstępny projekt korony lub plan otrzymany od dentysty jest wyjątkowo łatwe. System komunikacji 3Shape Communicate® lub inne narzędzia do komunikacji umożliwiają natomiast szybką konsultację i potwierdzanie wyników planowania. Następnie projektuj i produkuj szablony chirurgiczne wsparte na zębach lub kości*, korzystając z funkcji planowania leczenia implantologicznego.



Możliwość świadczenia pełnego zakresu usług implantoprotetycznych

Dostarczając lekarzowi usługi planowania implantów i szablonów chirurgicznych, zwiększasz swoje szanse na otrzymywanie ofert wykonania pełnej odbudowy. Gdy otrzymasz zamówienie, wykorzystaj oprogramowanie Dental System do łatwego tworzenia łączników leczniczych i końcowych, tymczasowych koron i mostów mocowanych śrubą, a nawet docelowych protez.

Zoptymalizuj komunikację ze swoimi partnerami

Skorzystaj z oprogramowania do implantacji 3Shape i systemu Dental System, aby zoptymalizować cyfrową komunikację z dentystami dotyczącą obsługiwanych przypadków. Dzięki temu możesz być silnym partnerem począwszy od wczesnych etapów planowania do projektu i pakietu ostatecznej odbudowy. Dzięki temu nie tylko wykonujesz odbudowę, ale wzmacniasz relacje z dentystą jako niezawodny partner w zakresie usług.



*Szablony chirurgiczne wsparte na kości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez FDA do użytku klinicznego w USA.

Dentyści wkraczają do cyfrowego świata! Nie trać z nimi kontaktu!

Coraz więcej dentyстів wykonuje wyciski cyfrowo i korzysta z oprogramowania, aby zdobywać pacjentów. Możliwość pracy w laboratorium ze skanami wewnątrzustnymi ma kluczowe znaczenie. 3Shape ułatwia nawiązywanie kontaktów i odbieranie skanów wewnątrzustnych oraz reklamowanie Twojego laboratorium w gabinetach dentystycznych. A teraz dzięki nowemu konfigurowalnemu formularzowi zamówień w 3Shape TRIOS® możesz mieć pewność, że gabinety będą widzieć usługi i materiały oferowane przez Twoje laboratorium.



NOWOŚĆ: Dostosuj formularz zamówienia TRIOS specjalnie do swojego laboratorium

Teraz w systemie 3Shape Communicate® możesz dostosować formularz zamówienia TRIOS, aby zawierał tylko materiały i wskazania oferowane przez Twoje laboratorium. Oznacza to, że kliniki widzą i zamawiają tylko wskazania i materiały dostarczone przez Twoje laboratorium.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.3shape.com/triosready.



Dołącz do platformy 3Shape Community

Społeczność 3Shape Community, do której należy ponad 10 000 członków, stanowi profesjonalną platformę do poszerzania wiedzy i łączenia się z laboratoriami i klinikami na całym świecie. Jeśli chcesz podzielić się efektami swojej pracy, skorzystaj z Community, aby opublikować studia przypadków, lub po prostu rozpocznij dyskusję na forum. Członkostwo jest darmowe.

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów 3Shape

Skorzystaj z przewodników instruktażowych, filmów szkoleniowych i samouczków dotyczących procedur związanych z projektowaniem, konfiguracją systemu, a ponadto korzystaj z porad i wskazówek — wszystko to znajdziesz w społeczności Community.

Forum pomocy technicznej

Otrzymaj odpowiedzi na swoje pytania bezpośrednio od specjalistów i korzystaj z biblioteki studiów przypadków.

Nawiązuj znajomości w sieci

Rozmawiaj o CAD / CAM w stomatologii, dziel się swoimi doświadczeniami i znajdź odpowiedzi na forum lub sprawdź kalendarz wydarzeń, aby odkrywać kursy, imprezy i seminaria internetowe.

Dołącz do platformy
3Shape Community
pod adresem
community.3shape.com



Upraszczaj leczenie z użyciem przezroczystych aparatów ortodontycznych już laboratorium

Dzięki 3Shape Clear Aligner Studio wykonywanie przezroczystych aparatów ortodontycznych jest łatwe. Jest to rozwiązanie krok po kroku, które umożliwia szybkie i łatwe rozszerzenie oferty usług Twojego laboratorium o przezroczyste aparaty ortodontyczne.

Zacznij od prostego leczenia z użyciem przezroczystych aparatów ortodontycznych

Zautomatyzowane funkcje rozwiązywania Clear Aligner Studio i sterowane procedury ułatwiają tworzenie prostych przezroczystych aparatów ortodontycznych, na przykład obejmujących zęby przednie. Wystarczy wydrukować modele i uformować próżniowo aparaty ortodontyczne.

Otwarte opcje projektowania i produkcji oraz partnerzy

Oprogramowanie 3Shape Clear Aligner Studio jest kompatybilne z szeroką gamą drukarek 3D i maszyn do formowania próżniowego. Możesz również zdecydować się na outsourcing wykonania projektu do partnerów 3Shape, którzy świadczą takie usługi, a przygotowanie, konfigurację etapów i produkcję możesz zlecić wykwalifikowanym partnerów produkcyjnym 3Shape.



Rozwiązanie 3Shape Clear Aligner Studio jest dostępne jako moduł dodatkowy systemu Dental System.



„Oprogramowanie 3Shape bardzo ułatwiło nam wejście na ten nowy rynek. Odkąd zaczęliśmy oferować przezroczyste szyny korekcyjne, prawdopodobnie potroiliśmy liczbę klientów w ciągu ostatnich kilku lat”.

Bernhard Egger
Właściciel Natural Esthetics

Dobór odpowiedni do Twoich potrzeb

1. Wybierz skaner

E1

Podstawowe funkcje skanowania na potrzeby laboratoriów cyfrowych



E2

Zwiększenie wydajności oraz funkcja skanowania tekstury



E3

Wyjątkowa wydajność pracy oraz dokładność potrzebna do skanowania pod belki na implantach



E4

Bardzo duża prędkość i dokładność



D2000

Skanowanie typu „wszystko w jednym” zapewnia maksymalny wzrost wydajności pracy



2. Wybierz oprogramowanie do projektowania

Complete Restorative

Możliwość korzystania ze wszystkich opracowań pakietów Premium i Removable oraz wszystkich dostępnych modułów dodatkowych, umożliwiających projektowanie łączników implantologicznych, belek na implantach, modeli i innych wyrobów w atrakcyjnej cenie.



Premium

Możliwość projektowania wszystkich opracowań dostępnych w pakiecie Crown & Bridge, a także stosowania szyn, cyfrowych tymczasówek, cyfrowego projektowania uśmiechu, technologii RealView, teleskopów, wkładów koronowo-korzeniowych i innych opcji.



Crown & Bridge

Możliwość projektowania pełnokształtnych koron i mostów, czapek, podbudów oraz wosków diagnostycznych. Użycie punktów CAD umożliwia dostęp do zaawansowanych rodzajów uzupełnień.



Removable

Dla laboratoriów specjalizujących się w wykonywaniu protez całkowitych i częściowych.



Scan Only

Łatwy sposób wprowadzenia rozwiązań cyfrowych. Odbierz obudowy 3Shape TRIOS® lub zeskanuj modele gipsowe i wyślij do zewnętrznego usługodawcy projektowego.



Opcjonalne moduły dodatkowe i punkty CAD

Uzupełnij swoje oprogramowanie o moduły dodatkowe, aby oferować łączniki implantologiczne, belki i mosty na implantach, modele, protezy i inne rozwiązania. Dokup punkty CAD, aby używać ich w razie potrzeby zaprojektowania rozwiązań, których nie zawiera określony pakiet.



3. Wybierz pakiet usług odpowiednio do potrzeb i budżetu

Subskrypcja LabCare

Autoryzowane wsparcie

Zyskujesz pomoc ekspertów w lokalnym języku i strefie czasowej*

Aktualizacje oprogramowania

Zyskujesz wszystkie nowe wersje oprogramowania z najnowszymi bibliotekami, procedurami i narzędziami.

Szeroka gama opcji szkoleniowych

Dostęp do praktycznych szkoleń i wykładów prowadzonych przez autoryzowanych ekspertów firmy 3Shape i renomowanych prelegentów*

25% zniżki

dla dodatkowych osób zapisywanych na szkolenie w Akademii 3Shape w lokalnej placówce firmy 3Shape*

Chroń swoją inwestycję

5-letnia gwarancja i usługa wymiany przy zakupie skanerów E4 lub D2000**

Pakiet Basic bez subskrypcji



Płatne wsparcie

Opłaty naliczane w przypadku wsparcia



Brak aktualizacji

Otrzymujesz wersję oprogramowania aktualną dla roku zakupu.



Brak specjalistycznych szkoleń

Samokształcenie na podstawie dostępnych filmów i instrukcji firmy 3Shape



Brak zniżek

Nie przysługują oferty specjalne



Brak opcji

Brak opcji gwarancji i usługi wymiany

*W zależności od dostępności w danym kraju

**W przypadku innych skanerów można zakupić oddzielnie gwarancję i usługę wymiany produktów firmy 3Shape

Najszerszy zakres procedur leczenia

Pojedyncze korony



Pełne mosty anatomiczne



Uzupełnienia tymczasowe



Wirtualne woskowania diagnostyczne z modelami



Mosty Maryland



Czapki



Nakłady i licówki bez opracowania




Szyny



Podbudowy mostów



Korony i mosty z redukcją pod licowanie na powierzchni wargowej

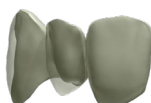

Teleskop pierwotny




Teleskop wtórny




Inlaye, onlaye i licówki



Korony mocowane za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego

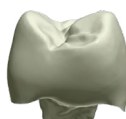

Standardowy wkład koronowo-korzeniowy

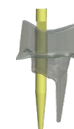

Prowadnice



Niestandardowe łożyska wyciskowe




Cyfrowy projekt uśmiechu i technologia RealView



www.dental.pl

Denon Dental Sp. z o.o. ul. Kolejowa 49 Konstancin-Jeziorna

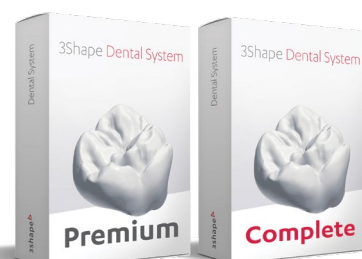

tel. +48 22 717 58 70

Oprogramowanie firmy 3Shape jest cenione ze względu na niezrównany zakres procedur leczenia odpowiadających zróżnicowanym potrzebom i preferencjom dentystów oraz ich pacjentów. Wybierz odpowiedni pakiet oprogramowania w zależności od potrzeb, a następnie rozszerz swoje portfolio o kolejne usługi, aby prześcignąć konkurencję. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 3shape.com/lab.

Pojedyncze protezy całkowite




Protezy



Zdejmowane protezy częściowe



Niestandardowe łyżki wyciskowe

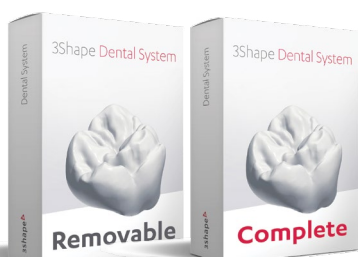

www.dental.pl

Modele do prac na implantach z analogami



Belki na implantach



Korony mocowane śrubą z pomniejszoną anatomią do licowania




Mosty protetyczne na implantach



Niestandardowe łyżki wyciskowe do prac z użyciem implantów



Modele koron i mostów

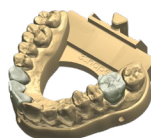

Mosty mocowane śrubą




Łączniki niestandardowe



Korony mocowane śrubą



IvoSmile®

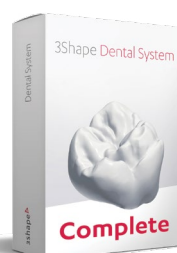

Denon Dental Sp. z o.o. ul. Kolejowa 49 Konstancin-Jeziorna


Przezroczyste aparaty ortodontyczne



Planowanie umiejscowienia implantu i szablony chirurgiczne



Ortodoncja i aparaty

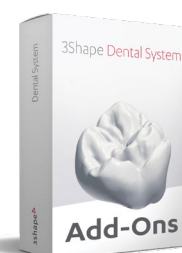

tel. +48 22 717 58 70

O firmie 3Shape

Firma 3Shape zmienia oblicze stomatologii dzięki współpracy z dentystami na całym świecie, stwarzając innowacje, które zapewniają pacjentom doskonałą opiekę stomatologiczną. Nasza oferta skanerów 3D i rozwiązań w zakresie oprogramowania CAD/CAM dla branży dentystycznej obejmuje wielokrotnie nagradzany skaner wewnętrzny 3Shape TRIOS®, innowacyjny skaner 3Shape X1® CBCT oraz czołowe na rynku rozwiązania pomagające gabinetom i laboratoriom dentystycznym w skanowaniu i projektowaniu.

Firma 3Shape została założona przez dwóch doktorantów w stolicy Danii w 2000 roku. Obecnie pracownicy firmy 3Shape w siedzibach 3Shape na całym świecie obsługują klientów w ponad 100 krajach. Produkty i innowacje firmy 3Shape nieustająco stawiają wyzwania tradycyjnym metodom, umożliwiając stomatologom efektywniejsze leczenie większej liczby pacjentów.

Zmieńmy razem oblicze stomatologii

Dlaczego 3Shape?

Szybkie skanery o udokumentowanej wg ISO wysokiej dokładności

Intuicyjne oprogramowanie do obsługi szerokiej gamy wskazań

Szkolenia i wsparcie zapewniane przez Akademię 3Shape i zespoły obsługi klienta

Wybór ponad 20 000 laboratoriów na całym świecie

Aby uzyskać informacje na temat dostępności produktów firmy 3Shape w danym regionie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

82602790 Broszura dotycząca systemu 3Shape Dental System 2020 PL

© 3Shape A/S, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo 3Shape i/lub inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi firmy 3Shape A/S, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

www.dental.pl

Denon Dental Sp. z o.o. ul. Kolejowa 49 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 22 717 58 70

3shape 